


DAIEI
Angel

MODEL TRIMMER

モデル トリマー

使用説明書

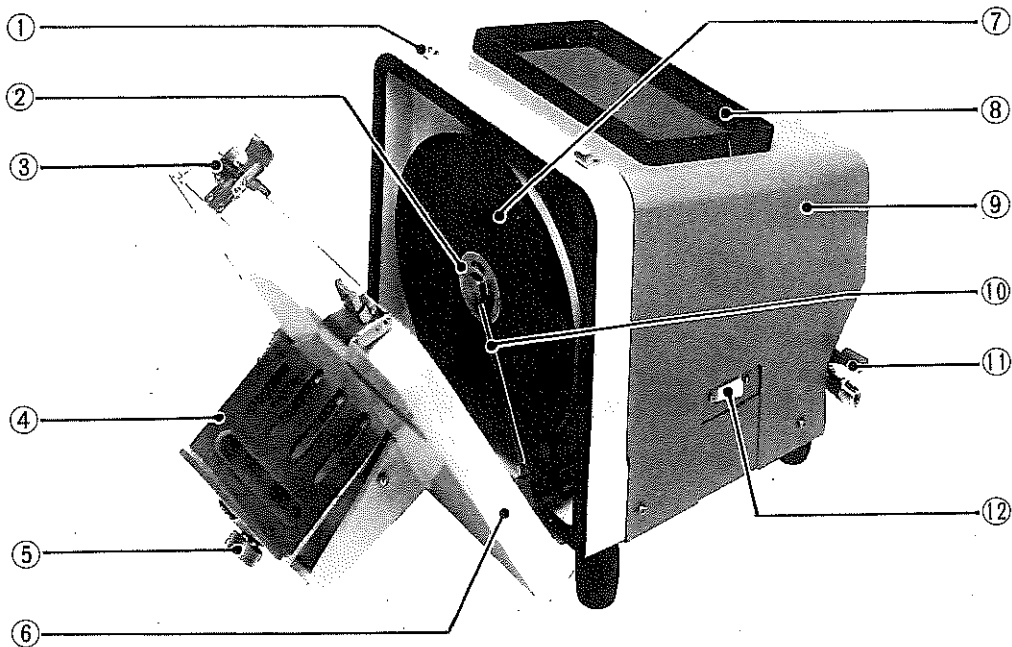

- | | | |
|---------------|------------|---------------|
| 1. ワンタッチフック受け | 5. 作業台調整ネジ | 9. モーターカバー |
| 2. センターロックネジ | 6. フロントパネル | 10. シャワーアダプター |
| 3. ワンタッチフック | 7. ジスク | 11. 吸水コック |
| 4. 作業台 | 8. ラバートレー | 12. メインスイッチ |

仕様	寸法	W285 × H305 × D420 (mm)
	重量	16.5kg
	電力	AC100V 50/60Hz 5.5/4.8A 1430/1720 r.p.m
	砥石	φ205mm

DAIEI DENTAL PRODUCT CO., LTD.

＜使用の前に＞

- ① 水道口より附属の切替カチットで配管します。
- ② 排水ホースをセットします。

排水には充分気を付けて下さい。

(排水浄化にはクリーンボックス)をお勧めします。

- ③ 電源プラグは、医用3P又はアース付平行プラグをAC100Vへセットします。

＜使用法＞

- ① 作業台を調整ネジで自由な角度に固定します。
- ② 吸水コックを開け(レバーを本体と平行にする)メインスイッチをONにします。
- ③ 作業台に石膏模型をのせ、ジスクにかかるくあてます。
- ④ 切れ味のよい石膏切削面が得られます。

＜ジスク交換法＞

- ① メインスイッチを切り吸水コックを閉じます。
- ② ワンタッチフック(2ヶ所)のロックをはずします。
- ③ 附属のレンチでジスクの交換を行ないます。
- ④ フロントパネルの清掃を行なう時は、パネルを開けて左へスライドするとはずれます。

大栄歯科産業株式会社

本社 ☎550 大阪市西区京町堀1丁目10-17 ☎06-441-3332(代) FAX 06-445-1276
東京営業所 ☎110 東京都台東区上野5丁目18-4 ☎03-836-0024 FAX 03-836-5390
名古屋営業所 ☎461 名古屋市東区東桜2丁目5-17 ☎052-932-2423 FAX 052-931-1868
仙台出張所 ☎983 仙台市高松3丁目18-31 ☎0222-75-8180 FAX 0222-34-7898
福岡営業所 ☎812 福岡市博多区博多駅前4丁目20-16 ☎092-473-7567 FAX 092-473-4897