


歯科用高圧蒸気洗浄機 **ロコモ**
DENTAL STEAMER **LOCOMO**

本体内部洗浄手順
各部の名称

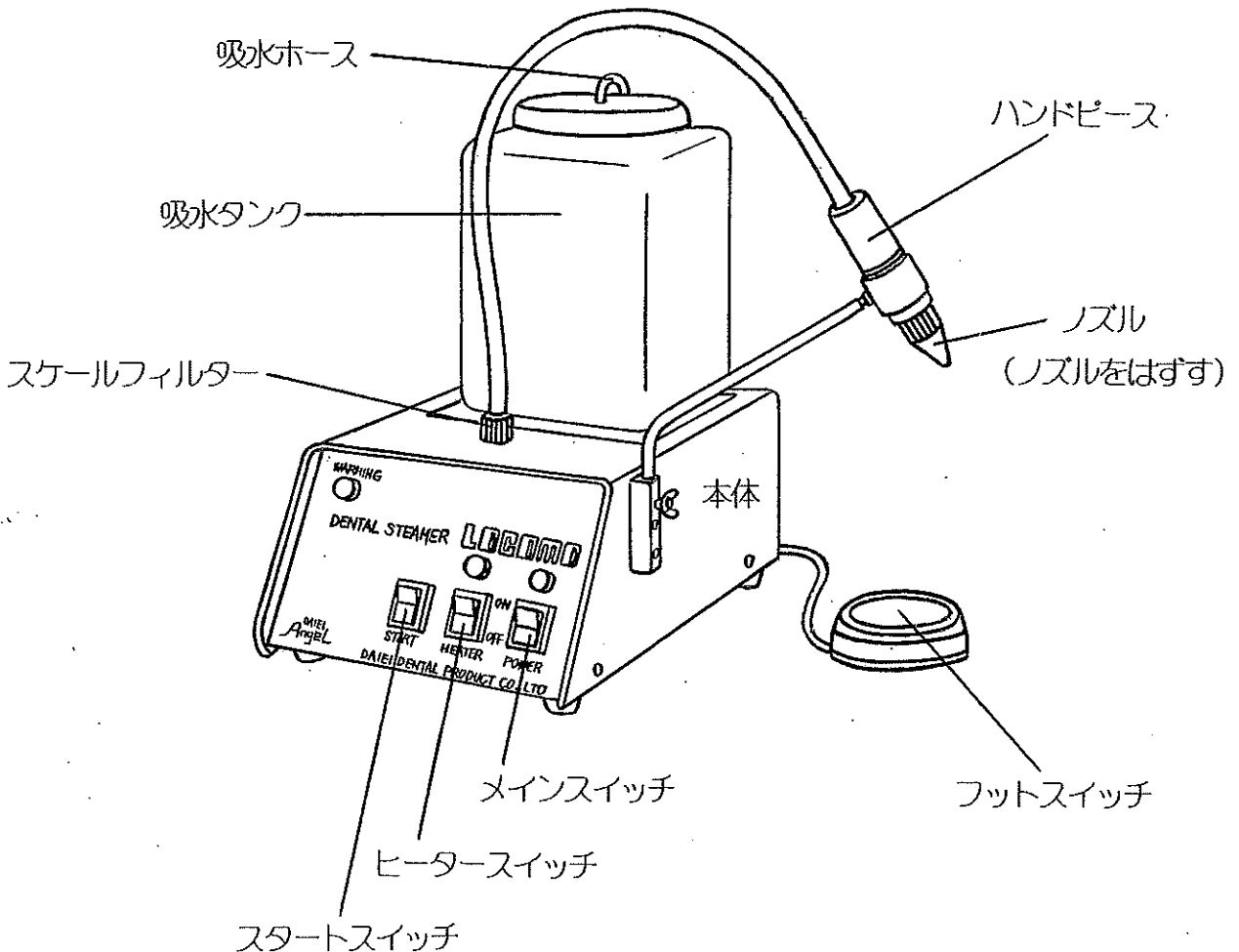


スタートスイッチ

スタートスイッチは旧型ロコモには付いていません。

操作手順


1

必ず本体が冷めている状態で洗浄を行って下さい。
ハンドピースの先端に付いているノズルを外して下さい。

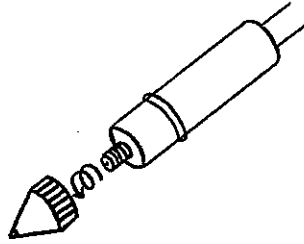


2

洗浄液 (500CC容器) にノズルを外したハンドピースと、吸水ホースを一緒に容器の中に入れます。

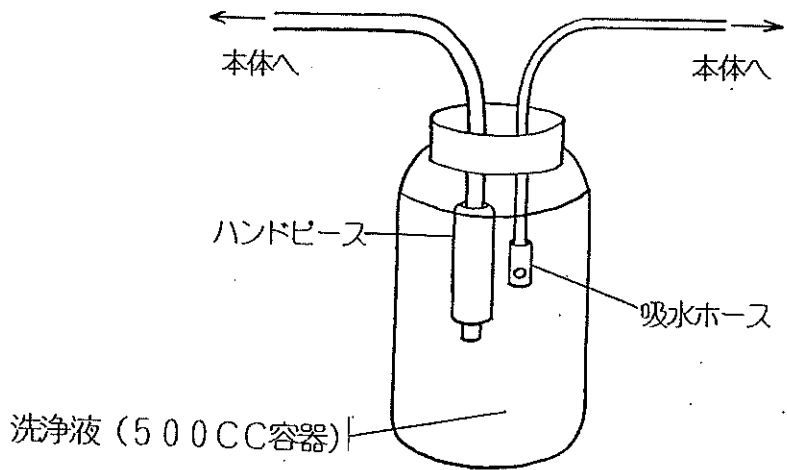


3

メインスイッチON (緑色)
ヒータースイッチOFF (黄色)

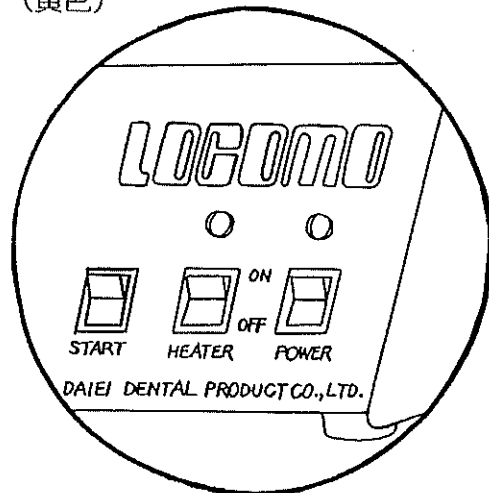


4

フットスイッチON又は、スタートスイッチON
 (5分間位続けて洗浄液を循環させて下さい。)

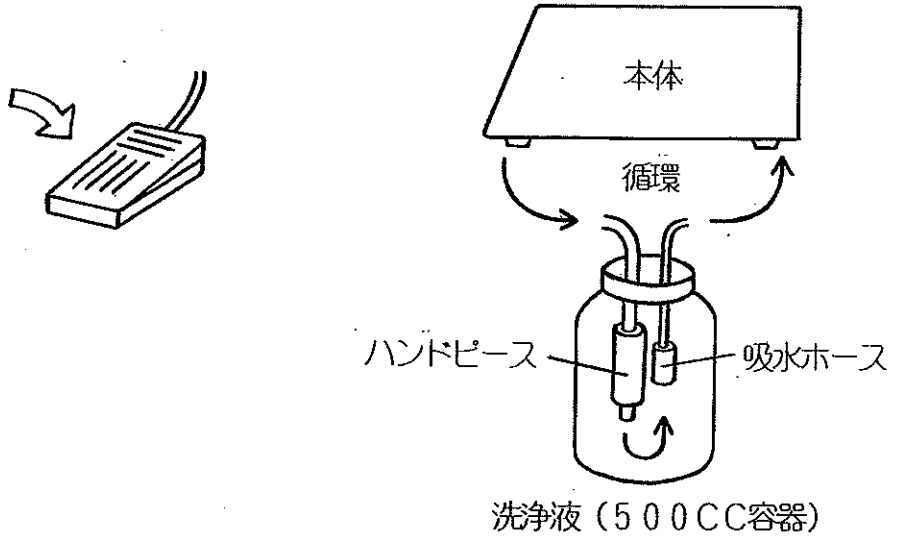

5

フットスイッチOFF又は、スタートスイッチOFF
 メインスイッチOFF (緑色)
 一晩放置して下さい。ハンドピースと吸水ホースは、容器の中から抜いておく。


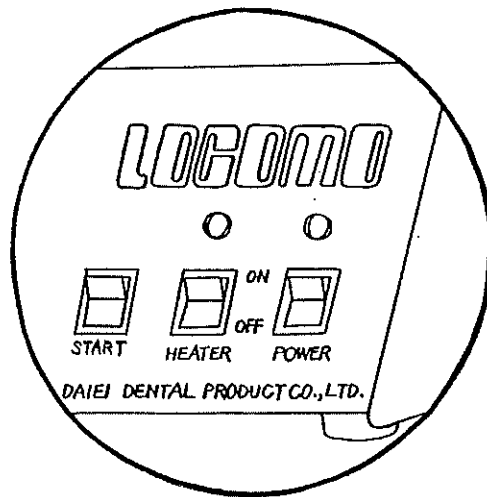


6

一晩放置した後、翌日洗浄液を再度5分間位循環させて下さい。(操作手順4)



- 7 ノズルを外したハンドピースを流し台に、吸水ホースを通常通り水の入った吸水タンク（白色ポリタンク）に入れて下さい。
- ↓
- 8 フットスイッチON又は、スタートスイッチON
（5分間位水を吸水させ本体の中に残っている洗浄液、不純物を洗い流して下さい。）
- ↓
- 9 フットスイッチOFF又は、スタートスイッチOFF
- ↓
- 10 ハンドピースにノズルを取り付けて洗浄終了となり、使用可能となります。

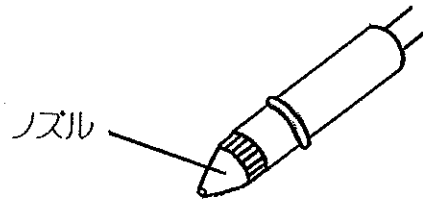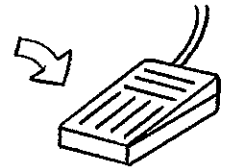

注意

1. 洗浄を行う時は、必ず本体が冷めている状態で行って下さい。
2. ハンドピースのノズルを外して洗浄して下さい。
3. スケールフィルターが付いていれば中の網を外して下さい。（図1参照）
4. ヒータースイッチ（黄色）をONにしないで下さい。
5. 操作手順5の際、24時間以上放置しないで下さい。

