


エンゼルバイブレーター デジタル

取扱説明書

名称と機能

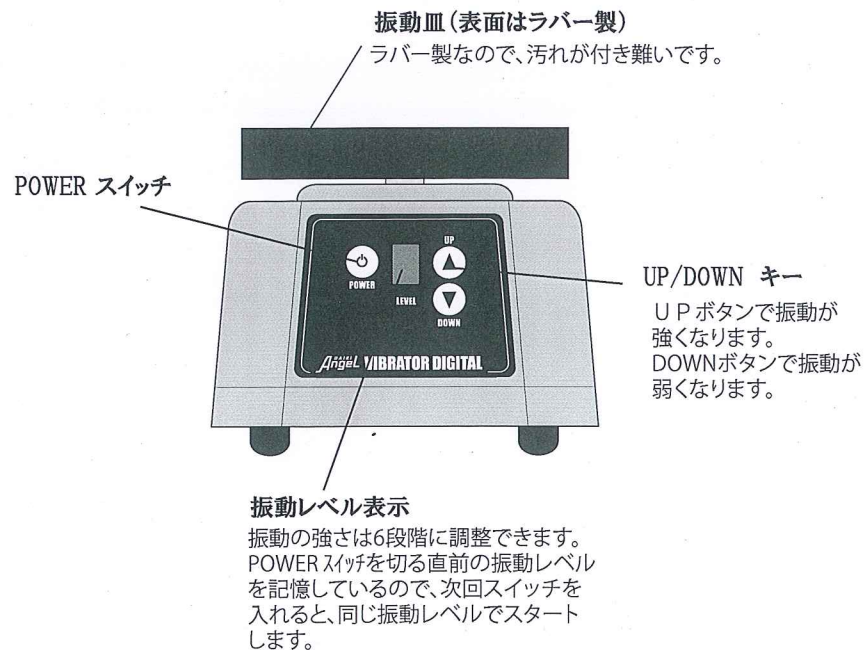

使用上のご注意

- ①振動皿部に過度の重量物を乗せないでください。故障の原因になります。
- ②不安定な場所におかないでください。
- ③次のような場所での使用は避けてください。
一直射日光、水、塩水腐食性ガス、ホコリ等の多い場所—
- ④異常と感じましたら、電源プラグをコンセントから抜いて、使用を中止してください。

仕様・定格

名称	エンゼルバイブレーター デジタル
本体寸法	W140×H110×D140 (mm)
振動テーブル寸法	φ108 (mm)
電力	AC100V 150W
重量	2.0 kg
定格時間	5分
レベル調整	タッチパネルによる6段階設定

アフターサービスについて

◎保証書 (別に添付してあります)

保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ年月日」などの記入をご確認のうえお受け取りになり、保証内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

◎保証期間

お買い上げの日から12ヶ月間。電源切り忘れのコイル焼けは対象外です。

◎修理を依頼される時

点検をしていただいても、なお異常のあるときは、故障状況をなるべく詳しくご連絡下さい。

◇保証期間中の時 (保証書に販売店名、日付印がないと無効となります。) 恐れ入りますが、お買い上げの販売店まで、保証書を添えてご持参下さい。保証書の規定に従って修理いたします。

◇保証期間が過ぎているとき

お買い上げの販売店に、まず、ご相談下さい。修理によって機能が持続できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。



重要

機械保護のため5分以上の連続使用はお避け下さい。
使用後は忘れないで電源をお切り下さい。
エラー表示が出ましたら電源を切り、装置が室温にまで冷えてからご使用下さい。

Angel 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897