

強力バイブレーター

目 次

1. 各部名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 ページ
2. 使用説明・取扱注意・・・・・・・・・・2 ページ
3. 仕 様・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 ページ

この度、大榮歯科用卓上バイブレーター「強力バイブレーター」を御買上げ頂き、有り難うございます。大榮では、一人でも多くのユーザー様に、ご愛用頂けるためにも、ご使用前に、必ず本書「取扱説明書」をお読み頂きます様、お願い申し上げます。ご使用上、何か不明な点やご質問等ありましたら、下記までご連絡下さい。
大榮歯科産業株式会社 本社 機械開発部 TEL 06-6441-3332 (代)

強カバイブレーター

- 1) 作業台は、安定した所を選んで下さい。
- 2) スポンジマットの上に、本機をセットして下さい。
スポンジマットは、作業中の本体の移動を防ぐと共に、防音効果があります。
- 3) 振動の強・中・弱を、ロータリースイッチで選んで下さい。
- 4) LOW-OFF-HIGH切替スイッチで、振幅の強・弱を選んで下さい。
中立は作動停止状態です。別売フットスイッチを使用すると、更に便利です。
- 5) 本体及び作業台が、石膏・埋没材で汚れます。常に清掃に心掛けて下さい。
- 6) 本機の定格は、10分です。10分以上の連続使用は、避けて下さい。

- 仕
様
- 寸法：W210×D175×H102^{mm}
 - 電力：AC100V 1A
 - 定格：10分
 - 重量：6kg

