

院内感染対策に！

フレームレスデザインで圧迫感を与えません！

DAIEI
Angel

Angel Eye Guard


切削粉や唾液、ウイルスから
医療従事者の目を保護します。

軽量設計により長時間装着の
負担を軽減します。


マスク紐を通す位置を変えることで
サイズ調整が可能です。




製品名:エンゼルアイガード 厚み:0.3mm
カラー:透明クリア 枚数:20枚入
寸法:縦185×横245 標準価格:¥2,800(税別)
重量:15g

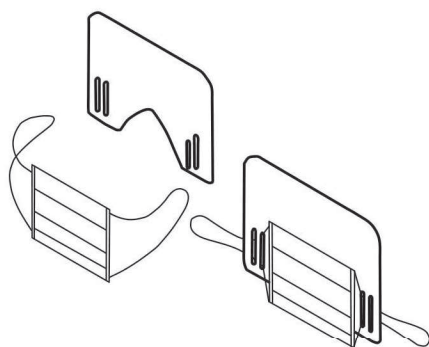

マスクの紐をエンゼルアイガードの
左右のスリットへ通してください。
紐を通す位置によってフィット感が
変化します。お好みに合わせて調節
してください。

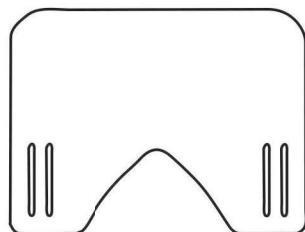

スリット(外側)
・フィット感:ゆるめ
・メガネありで、ご使用される場合
スリット(内側)
・フィット感:きつめ
・メガネなしで、ご使用される場合

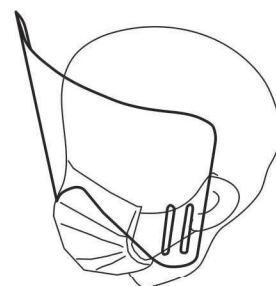

マスクの紐を耳に取り付けて完成です。
必要に応じて、エンゼルアイガードの
位置を調整してください。

※使用中に血液や体液で汚染された場合には、新しいものと交換してください。
※ご使用後は、各施設の取り決めに基づいて、廃棄してください。

日本製

DAIEI
Angel 大榮 歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

販売店