

エアーチゼル NF-00

取扱い説明書

- 付属の配管ホース・継手を使ってエア配管を行って下さい。ワンタッチジョイントにはホースを確実に挿入して下さい。
- 本機を利き腕でしっかりと握り、脇をしめて腰だめに持ち、スイッチレバーを作動させて破碎を開始して下さい。
- チゼル先端が前後運動を行う延長線上に腕、指、体、の一部等がこないようによく注意して下さい。
- 使用に際しては軍手等を着用して下さい。また、破片が飛び散る恐れがあるので、防護メガネ等を着用して下さい。
- 作業員以外の方が周囲にいない事を確認してから使用を開始して下さい。
- 定期的にチゼル部根元にマシン油を注油して下さい。
- 振動が強すぎる場合は別売の減圧コックを取り付けて下さい。（使用エア圧 0.2~0.5Mpa）
- 歯科用石膏・埋没材の破碎以外の用途には使用しないで下さい。



- 重量：550g (チゼル部除く)
- 附属品：エアホースφ6
本体接続用カプラ
ワンタッチジョイント (φ8-8-6)
潤滑用オイル
- 別売品：減圧コック

DAIEI
Angel

大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897