

# エンゼルバイブレーター デジタル


## 取扱説明書

### 名称と機能

#### 振動皿 (表面はラバー製)

ラバー製なので、汚れが付き難いです。

#### POWER スイッチ

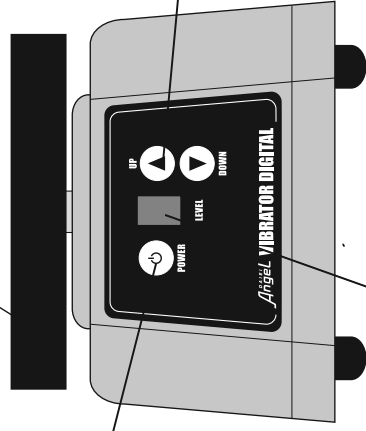

#### UP/DOWN キー

UP ボタンで振動が強くなります。  
DOWN ボタンで振動が弱くなります。

#### 振動レベル表示

振動の強さは6段階に調整できます。  
POWER スイッチを切る直前の振動レベルを記憶しているため、次回スイッチを入れると、同じ振動レベルでスタートします。

### 使用上のご注意

- ① 振動皿部に過度の重量物を乗せないでください。故障の原因になります。
- ② 不安定な場所におかないでください。
- ③ 次のような場所での使用は避けてください。  
一直射日光、水、塩水腐食性ガス、ホコリ等の多い場所
- ④ 異常と感じましたら、電源プラグをコンセントから抜いて、使用を中止してください。

### 仕様・定格

名称	エンゼルバイブレーター デジタル
本体寸法	W140×H110×D140 (mm)
振動テーブル寸法	φ108 (mm)
電力	AC100V 150W
重量	2.0 kg
定格時間	5分
レベル調整	タッチパネルによる6段階設定

### アフターサービスについて

#### ◎保証書 (別に添付してあります)

保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ年月日」などの記入をご確認のうえお受け取りになり、保証内容をよくお読みのことと大切に保管してください。

#### ◎保証期間

お買い上げの日から6ヶ月間。電源切り忘れのコイル焼けは対象外です。

#### ◎修理を依頼されるとき

点検をしていただいても、なお異常のあるときは、故障状況をなるべく詳しくご連絡下さい。

- ◇保証期間中の時 (保証書に販売店名、日付印がないと無効となります) 恐れ入りますが、お買い上げの販売店まで、保証書を添えてご持参下さい。
- ◇保証書の規定に従って修理いたします。

お買い上げの販売店に、まず、ご相談下さい。修理によって機能が持続できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

### 重要

機械保護のため5分以上の連続使用は避け下さい。  
使用後は忘れずに電源をお切り下さい。  
本体が熱を持った状態で、通電しても作動しない場合は電源を切り、装置が室温にまで冷えてからご使用下さい。  
それでも作動しない場合は当社までお問い合わせ下さい。

## ANGEL 大榮菌科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL06-6441-3332 FAX06-6445-1276  
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10,1510ビル8F TEL03-5828-0024 FAX03-5828-0026  
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中種区今池南2-9-24 TEL052-731-0610 FAX052-731-0626  
福岡営業所 〒814-0016 福岡市博多区博多駅前3-10-23第5西田ビル2C TEL092-473-7567 FAX092-473-4897