


ペーパー研磨不用の特殊合成繊維研削材

# DENTURE POLISHER

デンチャー ポリッシャー HP

スルフォン床、チタン、アクリルレジン床、  
コバルトクロム合金、パラジウム合金など  
様々な技工物の粗研磨、研削作業に対応。

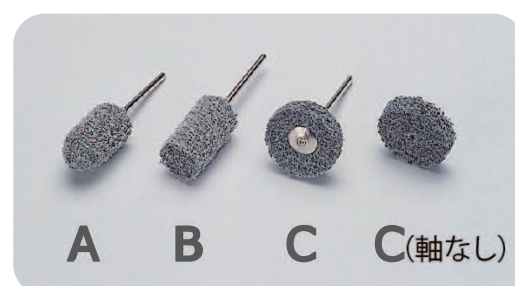

【特 長】 特殊合成繊維が研磨時に発生する粉じんを押さえます。  
大小のキズまで素早く取り除き**ペーパー研磨を不用**にし  
短時間で従来通りの光沢度を約束します。

## 【使用方法】

アクリルレジン床の場合

バリ取り  
技工用カーバイトバー



粗・中研磨  
デンチャーポリッシャー



艶出し

パラジウム合金の場合

スプールカット  
カッティングジスク




粗・中研磨  
デンチャーポリッシャー



艶出し

【使用上の注意】 適正回転数は6000rpm以下です。  
切削、研磨に際して、眼の損傷を防ぐため防護眼鏡を使用し、  
粉塵など吸入しないように注意して下さい。

## 【規 格】

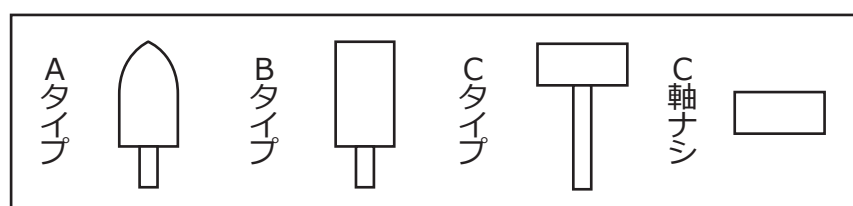

一般医療機器 届出番号13B3X00108000601