



バブルリムーバーV

# Bubble RemoverV



**DAIEI DENTAL PRODUCT CO.,LTD.**

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

価格等の情報は  
こちらから

バブルリムーバーV

## Bubble RemoverV

コンプレッサーからのエア一圧で、埋没材中の気泡を押し潰す  
加圧埋没機「バブルリムーバーV」は、縦型専用として開発され、  
小リングから金属床まで幅広くご利用いただけます。



## 特長

**床用** 金属床リング(2個)が収納できるワイドスペースの加圧タンクを採用しました。

**縦型** 縦型設計は $\phi 130 \times H95$ のリングまで、楽に入ります。(専用バスケット付)

**配管** バブルリムーバーVの接続はエア配管のみで、その他の接続(電気等)はありません。

**操作** 操作方法は、エアコックと扉の開閉で、誰にでも簡単にお使いいただけます。

**効果** バブルリムーバーVをご使用いただくと、鑄造体表面が滑らか(煩わしい気泡が無い)になり、研磨時間が大幅に短縮されます。

## 仕様

使用圧力 / 0.2~0.5MPa(メガパスカル):(従来表示 5kg/cm<sup>2</sup>) 外寸法 / W282×H350×D180 ミリ(蓋を閉じた状態)  
本体重量 / 14.5kg 内寸法 /  $\phi 145 \times H218$  ミリ( $\phi 130 \times H95$ のリング2個収納)

一般的名称: 歯科技工用加圧埋没機 分類: クラスI 許可/届出番号: 27B2X00306K00017

## 加圧埋没とは?

加圧埋没法は、埋没リングに流し込まれた埋没材(泥状)中の煩わしい気泡を圧縮空気の圧力によって押しつぶします。……………(圧縮効果)  
その後、埋没材が硬化するまで加圧下で放置(メーカー指示の硬化時間)し、再び大気圧に戻すと、圧縮された気泡は、元の大きさまで膨張しようとし、ところが硬化した埋没材の中では膨張できないので、埋没材の通気性により外へ噴出します。……………(脱泡効果)  
この圧縮・脱泡効果が、鑄造体表面の気泡をなくし、滑らかな面が形成され、その後の研磨作業過程において大幅な時間短縮が得られます。

2023. 03

## 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387  
名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

<https://www.daiei-dental.jp>

\*仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。