



安全にお使いいただくために、  
取扱説明書をよくお読み下さい。

# VIBRATOR

強力バイブレーター

取扱説明書

DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

## はじめに

このたびは、「強力バイブレーター」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ございます。

この取扱説明書は「強力バイブレーター」の正しい取扱い方法と安全にお使い  
いただくための注意、日常のメンテナンスが説明されています。

本機の性能を良好な状態で保っていただくために、本書をよくお読みいただき  
正しくご使用いただきますようお願いいたします。

この取扱説明書はご利用になられる方がいつでもご覧いただける場所に大切に  
保管してください。

## 本書について

- 本書の内容を無断で転載することは固くお断りします。
- 本書は予告なしに内容を変更することがございます。
- 製品の改良などにより、本書の内容と製品仕様と一部合わない箇所が生じる  
場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 乱丁、落丁がございましたら本書を交換させていただきますので、弊社また  
はお取扱い店様までご連絡ください。

## 保証について

本製品は厳重な検査を経て出荷されていますが、保証期間内（お買い上げから  
1年間）に正常なご使用において万一故障された場合は無償で修理いたします。

但し、消耗品におきましては期間内でも有償になります。

また、本機のトラブルによる作業の停滞などの二次トラブルにつきましては保  
証の範囲外とさせていただきますのでご了承ください。

# もくじ

---

はじめに .....	1
本書について .....	1
保証について .....	1
もくじ .....	2

---

## 1. 安全上のご注意

警告表示について .....	3
設置と接続について .....	3
使用について .....	4
保守・点検について .....	4

---

## 2. 各部名称と仕様

各部名称 .....	6
仕様 .....	6
付属品 .....	7
別売品 .....	7

---

## 3. 設置と使用方法

設置方法 .....	7
使用方法 .....	7

---

4. 注意点 .....	8
--------------	---

---

## 5. その他

故障点検 .....	8
保証 .....	8

---



## 1.安全上のご注意

### ⚠️ 必ずお守りください。

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

#### 警告表示について

誤った取扱いをした時に生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、障害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

#### 設置と接続について

### ⚠️ 警告

- **D種（第3種）接地工事によるアースを施したコンセントに本機を接続すること。**  
アースを接続しないと故障の時に感電の原因になります。アース接続は必ず電源プラグをコンセントに接続する前におこなってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。
- **引火性や可燃性にもものを近くに置かないこと。**  
爆発や火災のおそれがあります。
- **水のかかるところに置かない。**  
感電、漏電、および火災などの原因になります。

### ⚠️ 注意

- **電源は本機の定格（1.0A）以上の容量が得られる交流100Vのコンセントを単独で使用する。**  
たこ足配線をし容量が不足するとコンセントが発熱し、火災や感電のおそれがあります。
- **設置する机はできるだけ水平な場所を選び、機械の重さに十分に耐えることのできる水平な台の上に設置すること。**  
落ちたり、倒れたりしてけがの原因になります。

■ **風通しの良い場所に設置すること。**

風通しが悪い場所に設置すると場合によっては内部に熱がこもり、故障の原因となります。

■ **直射日光の当たる場所や熱機器の近くに置かない。**

故障の原因になります。

■ **あお向けや横倒し、さかさまにしない。**

故障の原因になります。

---

## 使用について



■ **電源プラグのホコリなどは定期的に取り除く。**

火災の原因になります。

■ **濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。**

感電の原因になります。

■ **異物を入れない。**

火災、感電の原因になります。

■ **異常が起きたらすぐに電源プラグを抜く。**

本体が破損した。  
異臭がする。  
煙が出ている。  
異常に熱い。

} などの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。

■ **本機に水をかけたり、濡らしたりしないでください。**

感電、漏電の原因になります。



■ **電源プラグを持って歩く。**

コードを引っ張ると傷つき、火災、感電の原因になります。

■ **本製品をむやみに分解しない。**

故障の原因につながります。

■ **電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり無理な力を加えないこと。また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりしないこと。**

コードが破損し、火災、感電の原因になります。

- 使用後は電源スイッチをOFFにすること。長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜くこと。

ケガや絶縁劣化による感電、漏電、火災のおそれがあります。

- 定期的に内部清掃をすること。

内部にゴミやホコリがたまったらそのまま使うと、故障の原因になります。



## 保守・点検について



- お手入れの際は電源プラグを抜くこと。  
感電の原因になります。
- 付属の工具でのメンテナンス時は電源プラグを抜くこと。  
感電の原因になります。
- ヒューズは必ず指定容量（Φ6×30 10A）のものを使用すること。  
感電、火災のおそれがあります。

## 2.各部名称と仕様

### 各部名称

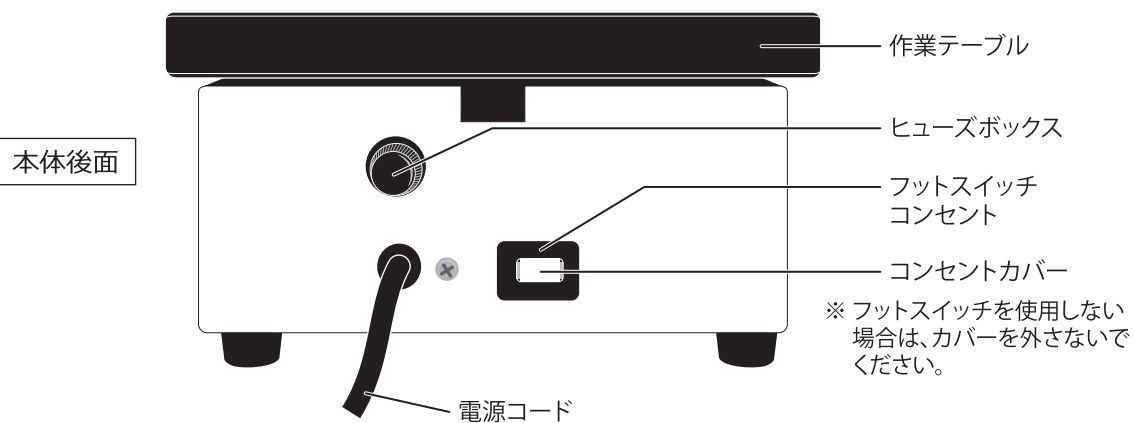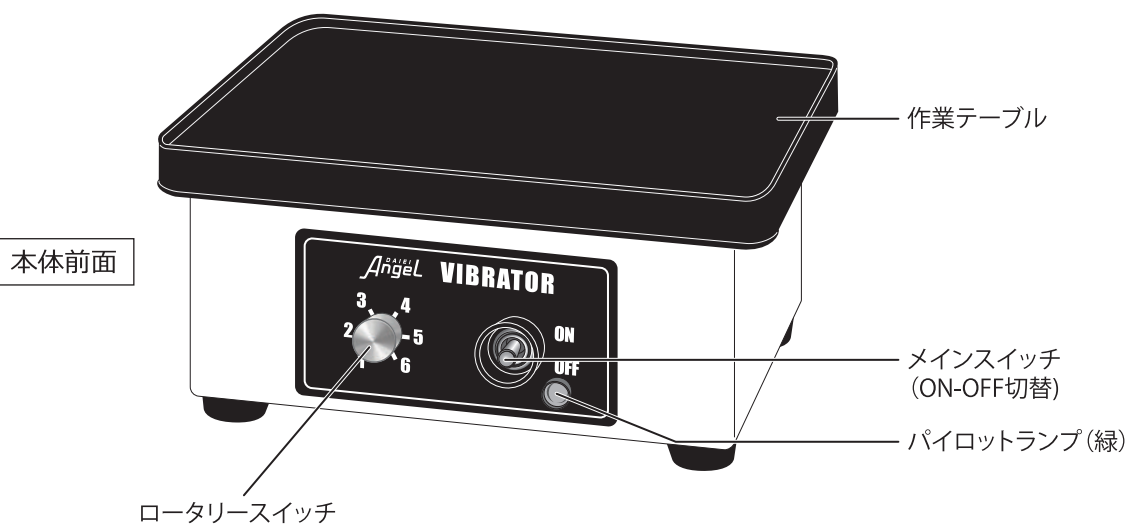


### 仕様

寸法	: W210xH102xD175(mm)
電力	: AC100V 50/60Hz 1A
重量	: 6kg
定格	: 10分
作動	: (1~6)×(ON-OFF)切替え

## 付属品



スポンジマット W208×D150×H8 (mm)

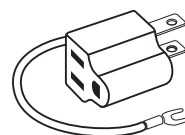

コンセントプラグアダプター  
(3P→2P変換用アダプター)

## 別売品

フットスイッチ (丸型) : 踏んでいる間ON

## 3.設置と使用方法

### 設置方法

1. 設置する机は、できるだけ水平で安定したものを選んでください。
2. スポンジマットの上に、本機をセットしてください。  
スポンジマットは、作業中の本体の移動を防ぐとともに、防音効果があります。
3. 電源は交流100Vコンセントを使用し、たこ足配線は避けてください。  
また、アースは必ず取り付けてください。(第三種設置工事)

### 使用方法

1. 振動の強さをロータリースイッチで選んでください。1～6の順に強くなります。
  2. メインスイッチは上下の切替で、上向きの位置が電源ON (緑ランプ点灯)、下向きの位置が電源OFF (緑ランプ消灯) となります。
- ※ 別売のフットスイッチを使用する場合は、本体のフットスイッチコンセントのカバーを外し、フットスイッチのプラグを差し込んでください。  
フットスイッチを使用しない場合は、コンセントカバーを取り付けてください。



### 注意

フットスイッチコンセントにコンセントカバーかフットスイッチが差し込まれていない状態では電源が入りません。



## 4. 注意点

1. 本機および作業台が、石膏・埋没材で汚れます。常に清掃に心掛けてください。
2. 本機の定格は10分です。10分以上の連続使用は避けてください。

## 5. その他

### 故障点検

万一故障が生じた場合は、販売店又は当社までご連絡ください。  
修理調整は全て大榮歯科産業に依頼していただき、使用者側ではおこなわないでください。

### 保証

当社に起因する故障の場合は、保証規定に基づき1年間は無償で修理させていただきます。  
但し、次の各項による場合はその限りではありません。

- ・保証書の提示、保証書の日付の記載が無い場合。
- ・本機を使用者側で勝手に改造された場合。
- ・使用者の誤った使い方によるトラブル。
- ・当社指定以外の研磨材をご使用の場合。
- ・消耗品の劣化によるものについて。

その他ご使用上、不明な点・質問等がありましたら、下記までご連絡ください。  
大榮歯科産業株式会社 本社 ☎ (06) 6441-3332



## 大榮齒科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387  
名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897