

DENTURE POLISHER

デンチャー ポリッシャー

価格等の情報は
こちらから

スルフォン床、チタン、アクリルレジン床、コバルトクロム合金、パラジウム合金など
様々な技工物の粗研磨、研削作業に対応。

- 【特長】 特殊合成繊維が研磨時に発生する粉じんを押さえます。
大小のキズまで素早く取り除き**ペーパー研磨を不用**にし
短時間で従来通りの光沢度を約束致します。

【使用方法】

アクリルレジン床の場合

バリ取り
技工用カーバイトバー粗・中研磨
デンチャーポリッシャー

艶出し

パラジウム合金の場合

スプールカット
カッティングジスク粗・中研磨
デンチャーポリッシャー


艶出し

【使用上の注意】

適正回転数は6000rpm以下です。
切削、研磨に際して、眼の損傷を防ぐため防護眼鏡を使用し、
粉塵など吸入しないように注意して下さい。

【規格】

タイプ	レギュラー	徳用5ホック
A	3本	10本
B	3本	10本
C	5本	16本
C 軸無し	—	20本

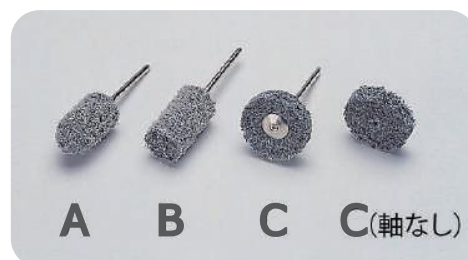

一般医療機器 歯科用研磨器材 届出番号13B3X00108000601

2023.01