

パラメイト取扱説明書

ご使用方法

- ◆ 耐酸性のガラス容器などに 0.8 リットルのぬるま湯（適温 50℃）と本剤全量（280g）を投入します。
（180 ccに対して大さじ 4 杯が目安です）
- ◆ 顆粒が溶けきるまでガラス棒でかき混ぜて溶液を作ります。
- ◆ 溶液に貴金属を投入して、表面がきれいになるまで放置します。
- ◆ 溶液を保管する場合は密栓してください。
- ◆ 廃棄する場合は、関連法規並びに地方自治体の基準に従って廃棄してください。
（主成分：硫酸水素ナトリウム）

安全対策

- ◆ 保護手袋、保護メガネ、保護面を着用し、目、肌、衣類等に付着させないように注意してください。
- ◆ 口に入ったり飲み込んだ場合は、水を飲ませて吐かせるなどの応急処置を行ってください。
- ◆ 目に入った場合は、流水でよく洗眼してください。
- ◆ 皮膚に付着した場合は、流水でよく洗い流してください。
- ◆ いずれの場合にも、すぐに医師の診察を受けてください。

危険有害性情報

危険



- ◆ 重篤な眼の損傷
- ◆ 消化器の障害のおそれ