

スチームクリーナー「ロコモ」お手入れ用パーツ

DAIEI
Angel

「イオン交換器Ⅱ」

定期的にお取り替え
ください

スチームクリーナーの目詰まりの原因となる水道水中のミネラル成分や塩素系成分をろ過

スチームが出ない…それ、水道水のせいかも？

水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル成分が加熱によって固まり、「スケール」となってボイラー内部に蓄積し、目詰まりを起こすことで故障の原因となることがあります。


この問題を軽減するために、カルシウムなどのイオン成分をろ過する「イオン交換器Ⅱ」のご使用をおすすめします。イオン交換器Ⅱを定期的に交換していただくことで「スチームクリーナーロコモ」を快適に、より長くお使いいただけます。

イオン交換器Ⅱ



【付属品】

吸水用ジュンロンホース

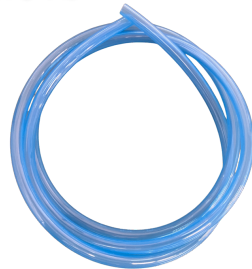


※内部にぬめりが発生するのでイオン交換器と一緒にご交換してください。

シール用キーホルダー



※使用開始日を記載したキーホルダーに貼ってホースに通すなど、目立つところに表示してください。

使用開始日シール

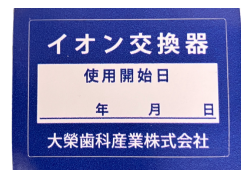

イオン交換器Ⅱを使用しなかったり、ろ過能力の落ちたイオン交換器Ⅱをご使用され続けると…

シングル、ダブル、トリプルパックをご用意しております。裏面の表からお勧めのイオン交換器タイプをお選びください。



スケールフィルターの金網にスケールが蓄積し目詰まりした状態



交換・詰替え時期の目安について

水の補充頻度（2.5L補充/回）	交換・詰替え時期の目安	お勧めのイオン交換器Ⅱタイプ
2日以上で1回補充	1年までに	シングルパック
1日に1回補充	約6ヵ月までに	シングルパックまたはダブルパック
1日に2回補充	約3ヵ月までに	ダブルパックまたはトリプルパック
1日に3回補充	約2ヵ月までに	トリプルパック
1日に4回補充	約1.5ヵ月までに	
1日に5回補充	約1.2ヵ月までに	
1日に6回補充	約1ヵ月までに	

セット内容

- ◆シングルパック:「イオン交換器Ⅱ本体」+「吸水ホース」 定価:9,800円
- ◆ダブルパック :「イオン交換器Ⅱ本体」+「詰替用パック×1」+「吸水ホース」 定価:16,800円
- ◆トリプルパック:「イオン交換器Ⅱ本体」+「詰替用パック×2」+「吸水ホース」 定価:23,800円

※シングルパック、ダブルパック、トリプルパックいずれをご使用の場合にも、使用開始より1年以内にセット品を使いきり新たなセットをご購入の上、ご利用いただくことをお勧めします。

DAIEI Angel 大栄歯科産業株式会社

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京 TEL.03-6806-3381 名古屋 TEL.052-731-0610 福岡 TEL.092-473-7567

2025.08