


ヒートショック対応・マイコンファーンネス

MD-Q1

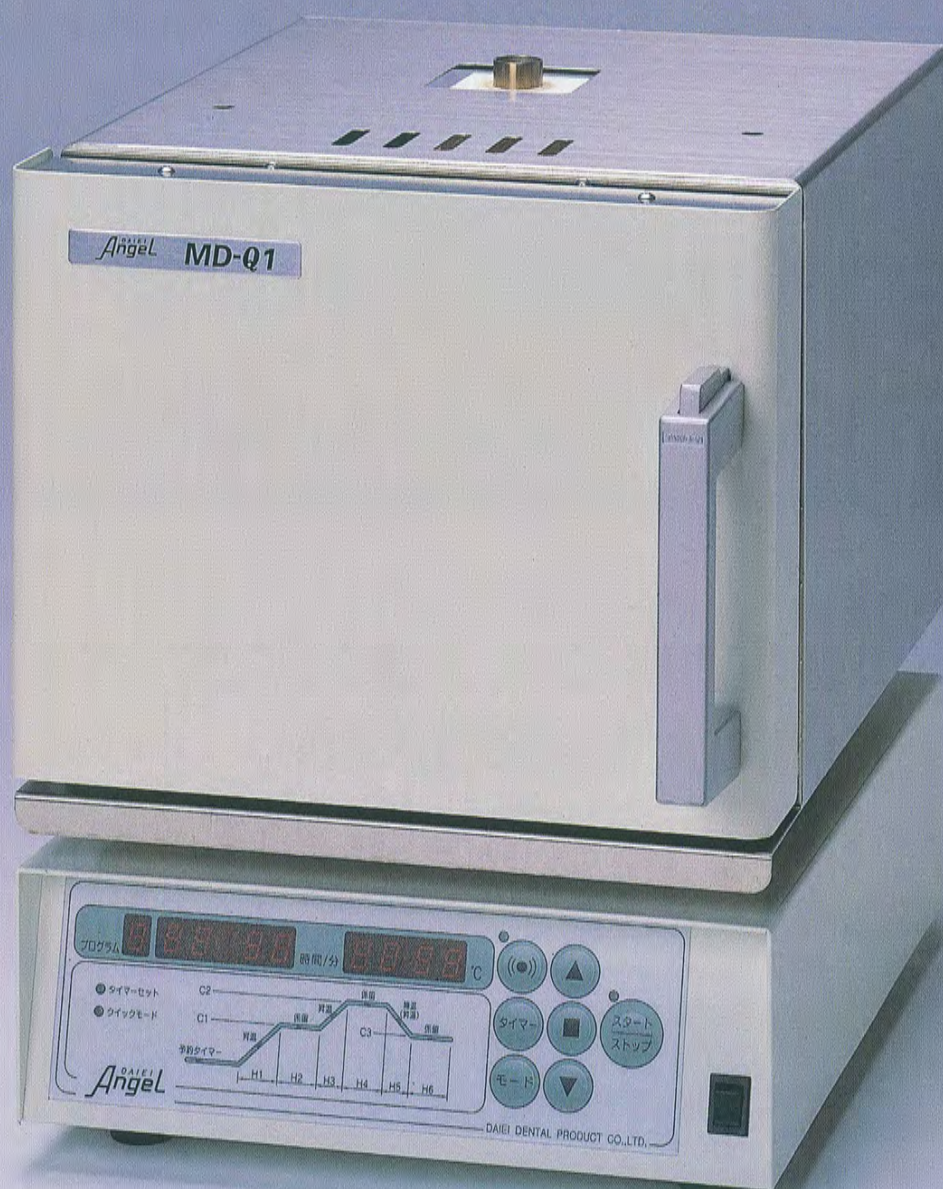

DAIEI DENTAL PRODUCT CO.,LTD.

10-17, Kyomachibori 1-chome, Nishiku, Osaka-550-0003, JAPAN

クイックモードとプログラムモードであらゆる昇温に対応

700℃まで13分(無負荷時)で昇温するクイックモードを1パターンと、最高三段階までの係留ができ、チタン鑄造に対応した降温設定も可能なプログラムモードを5パターン登録することができます。

高い耐久性と余裕の炉内スペース

炉体はセラミックウールの一体成型品を使用し気密性・耐久性に優れています。炉内はφ90mmリングなら2個収納でき、間口は幅140mmもあるのでリングバサミを使っただけの出し入れがスムーズです。

簡単操作と多くの機能とを兼ね備えた前面パネル

モードの設定はタッチキーで簡単に行うことができます。昇温開始はクイックモードなら電源を入れてスタートスイッチを押すだけです。昇温中に行程を省略するスキップ機能や終了までの残り時間を表示させる機能も備えています。また、タイマー予約は最長72時間先までの昇温終了時刻を設定できるので、毎日決まった時間に鑄造を行う場合非常に便利です。

一般的名称: 歯科技工用リング焼却炉 分類: クラスⅠ 許可/届出番号: 27B3X00209000010

最高温度 1000℃
常用温度 900℃
本体寸法 W285×H375×D420 (mm)
炉内寸法 W140×H95×D200 (mm)
電源電圧 AC100V 50/60Hz
電力 1100VA
外部電源 100V 300VA
本体重量 17kg
警告装置 熱電対断線警告
付属部品 リング受け皿1枚



プログラムNo.表示

プログラムモード時の登録No.を表示します

炉内温度表示

現在炉内温度や設定温度を表示します

時間表示


現在時刻(24時間計)や昇温終了までの残り時間を表示します

各種設定キー

フラットパネルで怪いタッチで操作できます

昇温グラフ

昇温行程の経過を表示します

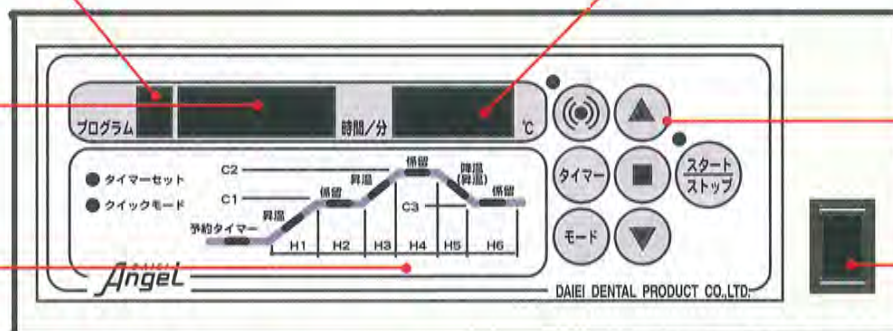

ACE-CLEANER 電気炉用脱臭装置

エンゼル エースクリーナーは、吸引ファンと白金触媒の力で、ワックス焼却時の診療室・技工室や戸外へ流れる不快臭を取り除き、しかも術者の健康を守ります。また、快適な環境のもとで能率よく作業ができます。

仕様

本体寸法 : W230×H185×D210(mm)
本体重量 : 5kg
電源電圧 : AC100V 50/60Hz
電力 : 300VA
触媒 : 白金触媒



一般的名称: 歯科技工用鑄造器関連器具 分類: クラスⅠ 許可/届出番号: 27B3X00209000020

大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897
<http://www.daiiei-dental.jp>

※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。