

∠30°の魅力!



BLENDER

真空攪拌機—ブレンダー

DAIEI DENTAL PRODUCT CO.,LTD.

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

BLENDER

真空攪拌機—ブレンダー—

DAIEI
Angel

ブレンダーは、回転軸に30°の角度を設けることで、あらゆる埋没材、石膏等の理想的な練和泥が得られます。
エアークッションによる吸引(真空)は攪拌カップを本体に吸着し、カップを持つ煩わしさから開放され、自動復帰タイマーの採用により、ワンタッチスタートが可能になり、誰でも簡単に操作することができます。

特長

- エアークッション真空装置を標準装備。
- どこでも簡単に設置できるコンパクト設計。
- フリーハンド方式により楽々操作。
- 自動復帰タイマーの採用によりワンタッチスタートが可能。
- 練和ムラがなく清掃が容易なラバーカップ。



スタンド別売

∠30°の秘密

30°の角度は、羽根の回転による埋没材のかき上げとカップ内での埋没材の重力落下により、効果的な練和泥が得られます。(当社比)

ワンタッチスタートが実現

自動復帰タイマーの採用により、初回のみ練和時間(最大72秒)を任意に設定し、2回目以降の使用時は、カップを吸着させた後、スタートボタンを押すだけで回転が開始され、終了するとブザーでお知らせします。

より緻密な練和を希望される方に

ブレンダーはお手持ちの真空ポンプを接続することができます。真空ポンプを利用すると、より完全な真空になり埋没材中の気泡が少なくなりより緻密な練和泥が得られます。

(注意) エアークッション不要、別売真空ポンプ用電磁弁セット必要

より多量の練和を希望される方に…

攪拌カップ(ラバー製)は、大小各1個が標準装備されています。

より多量(1kg程度)の埋没材を練られる方のために、別売特大攪拌カップをご用意していますので様々な埋没に対応します。



特大攪拌カップ1kg用
(別売)

カップ大
(付属品)

カップ小
(付属品)

仕様

電源 : AC100V 1A	吸引流量 : 47Nℓ/min
作動エア : 0.35~0.78MPa	吸引力 : 700mmHg
本体重量 : 8kg	攪拌能力 : 大90g~600g (攪拌カップ)
本体寸法 : W163×D350×H215mm	: 小50g~350g

別売品

- 専用スタンド
- 真空ポンプ(電磁弁セット付)
- 特大攪拌カップ1kg用

一般医療機器 届出番号27B3X00209000004

大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。