


排水浄化器 クリーンボックス・ミニ 取扱説明書

■ 取付方法

- 仕切り板 A B C をセットし、フタをきちんと閉めて下さい。
- ホース上 (IN) を排水栓と本体 (IN) にしっかりとねじ込み固定します。
- ホース下 (OUT) を本体 (OUT) にしっかりとねじ込み、一方は排水管に入れて下さい。



■ 掃除

- ホース上 (IN) を排水栓から外します。
- ホース下 (OUT) を排水栓から外します。
- ホース上 (IN) の、排水栓から外した方を、本体 (OUT) にねじ込みます。
- 本体を取り出し、仕切り板 A B C を外します。
- ボックス内に沈殿したゴミを取り除きます。

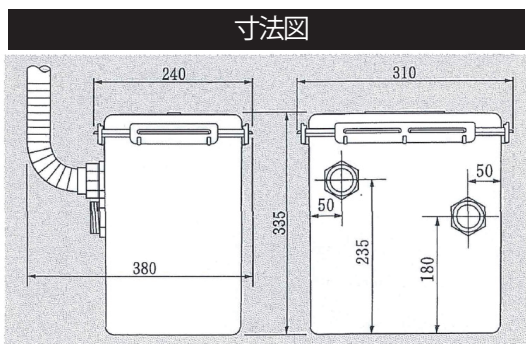

本体重量：2kg 貯水量：約10L

ゴミ収納器が邪魔になって設置できない場合、
万能アダプター排水栓に取り替える事により、
簡単に設置できます。

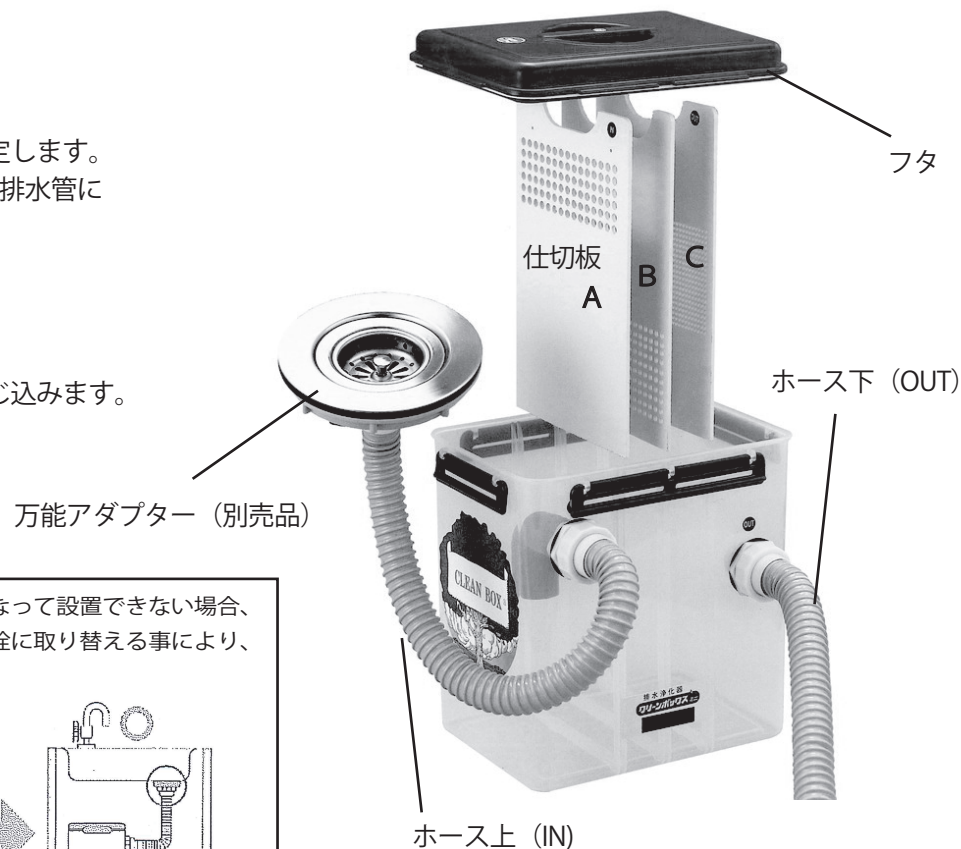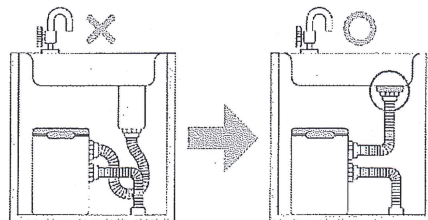

大栄歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897