


小型卓上集塵機 —— ハンディーダスター

HANDY DUSTER

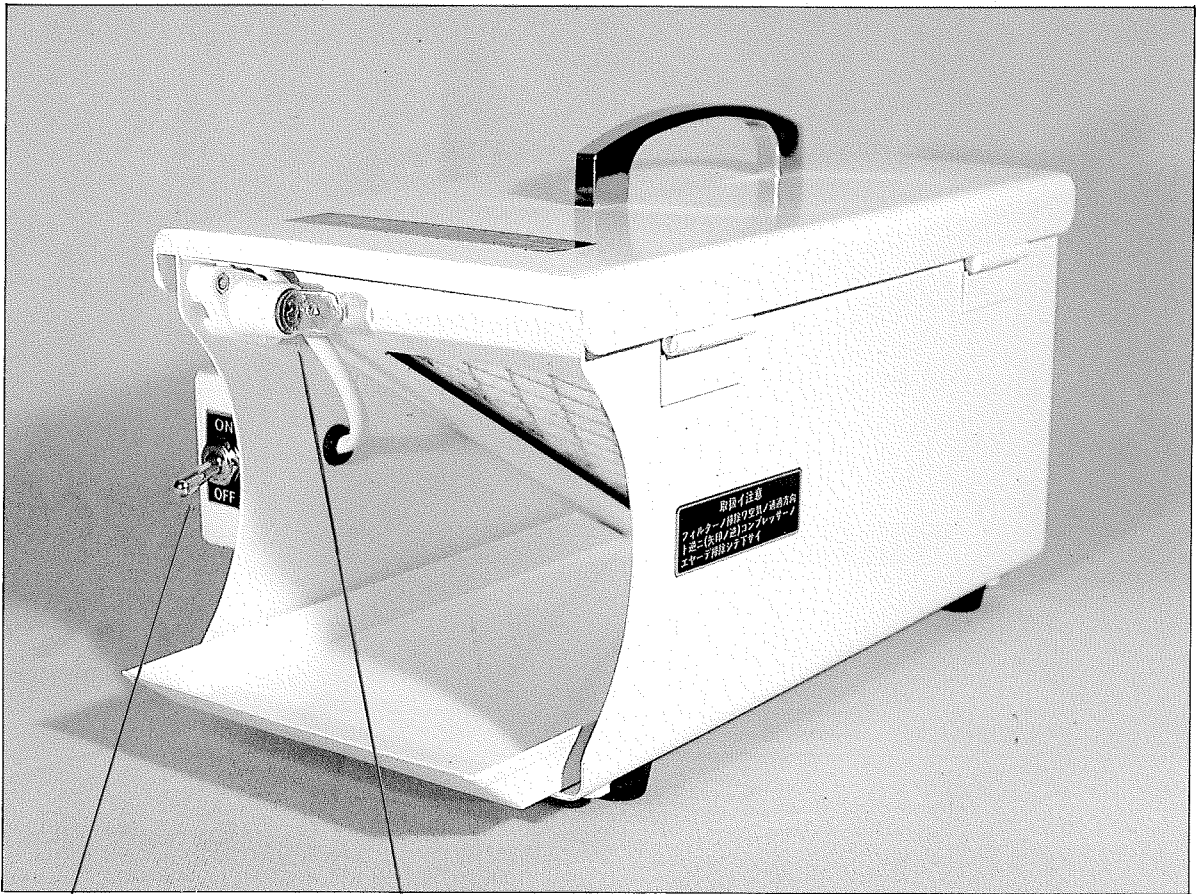

電源スイッチ


ランプ

この度は、大榮歯科産業製卓上集塵装置『ハンディーダスター』をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用に際しましてご不明な点がございましたら、下記までご連絡下さい。

大榮歯科産業 本社開発 TEL06-6441-3332

金属、石膏の研削研磨時に発生する塵やホコリ（金属粉、石膏粉、研磨材等）を卓上で集塵します。

集塵口にはランプで手元を明るくしています。

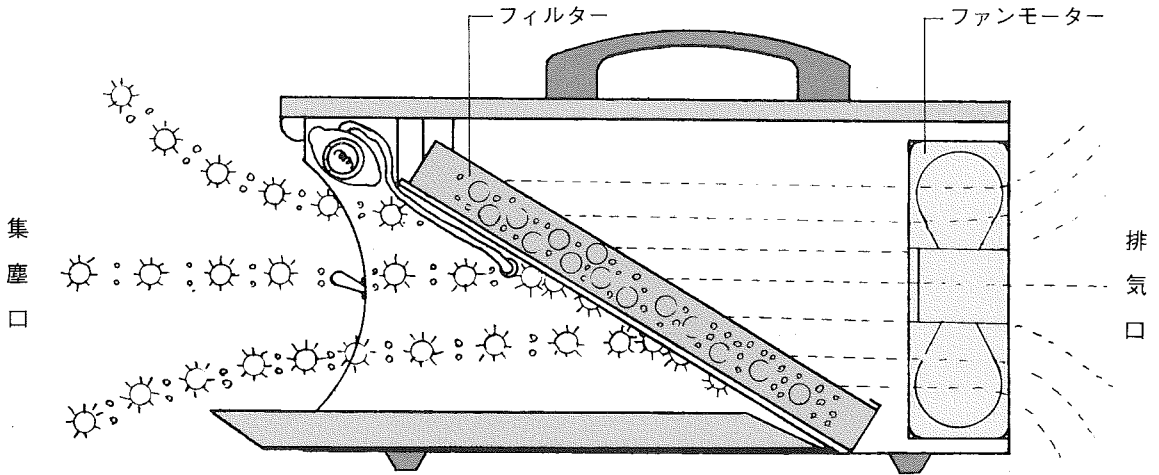

■能力

最大吸引風力	最大静圧	最大風速	集塵率	給塵率
1.8m ³ /min (1.6m ³ /min)	9.5mmAq (9.2mmAq)	2 m/sec (1.8m/sec)	82%	460g/m ³

60Hz
(50Hz)

■仕様

寸法	集塵口	電力	重量
W175×H190×D310 mm	W145 × H120 mm	AC100V 20W	3.5kg

※ フィルターは定期的に取り出して、清掃してください。