

自在集塵ホース

DAI-EL
Angel


フレキシブルマウス 取扱説明書

●特長

- ・自在にホースの形状を変える事が出来、空中での固定も可能。
- ・ホースの径を変える事が出来るので、接続が容易。
(※東京技研製の『金属シャッター』に接続する場合は『Φ40用接続金具』が必要です)

●注意

- ・あまり急な角度には変形しませんので、曲げすぎないようにして下さい。
- ・ホースの径を絞り過ぎたり、広げ過ぎたりしないで下さい。
- ・ホースが途中で折れてしまった場合は、下図の様に一旦解きほぐしてらせん状にし、溝にはめ込みながら、筒状に戻して下さい。
- ・ホースがたるんで空中で固定できなくなったら、反時計回りにねじって形を整えて下さい。

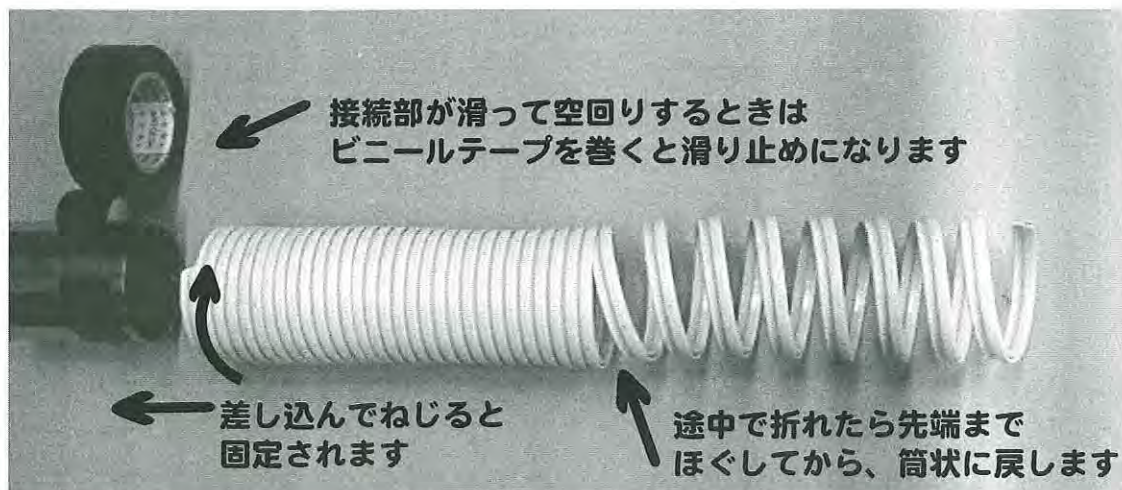

大榮齒科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897