



ガラススタンド・集塵ホースセット

名称

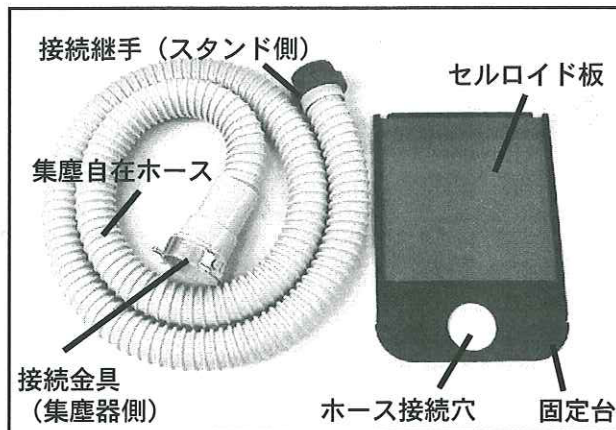


取付け

固定板裏面の両面テープを使い、固定板を作業台にしっかりと接着します。この時、集塵ホースを接続させたまま作業を行い、ホースが抜き差し出来る幅が確保されている事を確認してから接着する様にして下さい。ホースの一方は集塵機に接続して下さい。

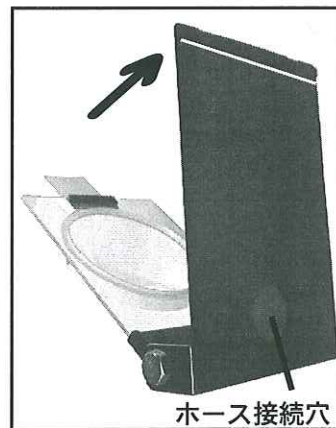

使用前準備

ガラススタンド底板の前後2箇所に滑り止めのゴムが貼ってありますが、後側のゴムを綺麗にはがしておきます。

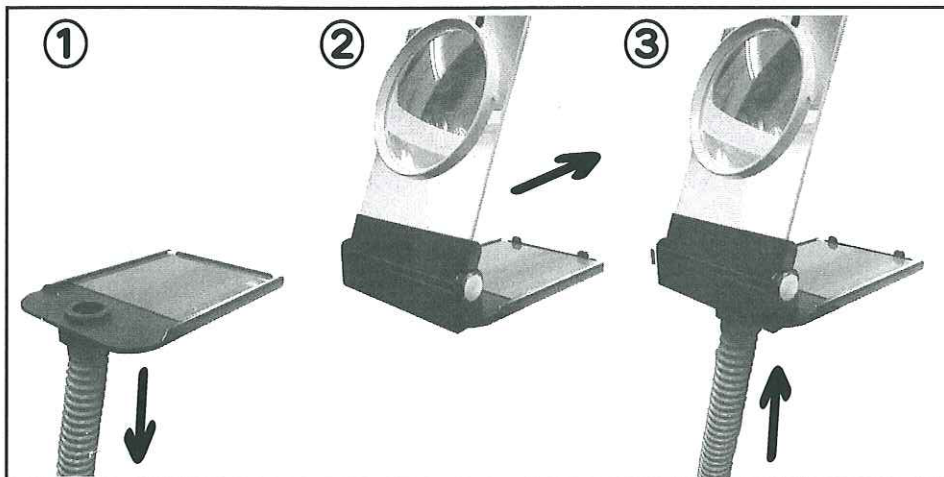

ガラススタンドの接続

- ① 固定台から集塵ホースを取りはずし、セルロイド板を引き抜きます。
- ② ガラススタンドとセルロイド板を固定板の溝に差し入れます。
- ③ 再び集塵ホースを差し込みます。

注意

- ・ 固定台を接着する作業机は、凹凸が無いものにしてください。また、予め接着面を綺麗にしておいて下さい。
- ・ 固定台の、机からせり出している部分に強い負荷をかけないで下さい。

大栄歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
 名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897