


ワクサー ポット
WAXER POT

信頼のマーク
Angel

大榮歯科産業株式会社
社 大阪市東区京町 1-10-17
Tel (06)4.441-3332
Fax (06)4.445-1276

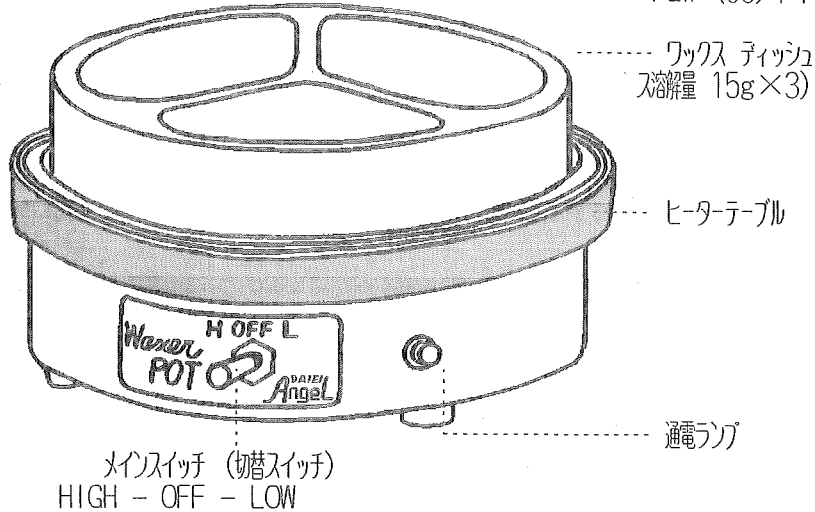

特長

- ◎ 適度なヒーター温度は、ワックスの劣化を防ぎ、ワックスの収縮を最小限に抑えられます。
- ◎ ワックスアップ作業の能率が向上し、時間短縮につながります。
- ◎ 市販のワックス (缶入) をそのまま利用できます。
- ◎ ワックスティッシュは3分割されており、色々なワックスを同時に溶解する事ができ、大変便利です。
- ◎ コンパクト設計は、作業性向上と共に、置き場所を選びません。

使用方法

- 水平な作業机に設置し、電源 (AC100V) を入れる。
- ヒーターテーブルに市販ワックス (缶入) 又は、ワックスティッシュ を置きます。
- メインスイッチ (切替スイッチ) をHIGHにします。
10分~20分でワックスが溶け始めます。(室内の気温により異なります)
30分~40分でワックスは完全に溶けます。
- 適当な時点で、スイッチをLOWに切替えます。
LOWでのワックスの状態は、室内気温が20℃の時、ドロドロ (コロイド) 状態になりますが、室内の気温によって異なります。
- 気温が高くLOW状態でもワックスが溶け過ぎる場合は、切替スイッチをOFFにして下さい。

仕様

- 電 力 100V 0.2A 50/60Hz 連続使用可能
- 寸 法 { 本体 φ115 (スイッチを含む) ×H35
- { ティッシュ φ82×H25
- 重 量 { 本体 265g
- { ティッシュ 165g