


イオン交換器Ⅱ

◆イオン交換器とは

「イオン交換器Ⅱ」は水道水中の不純物を取り除き、ロコモを長期間にわたって快適にお使いいただく為の器具です。説明書をご覧ください。正しくお使いください。

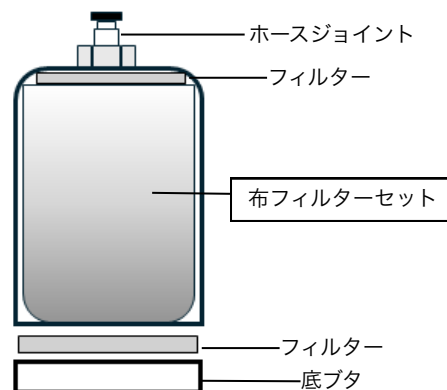

◆「水道水に含まれるカルシウムなどのミネラルや塩素系成分」について

「イオン交換器Ⅱ」は、水中にイオンの形で溶けているカルシウムや塩素系成分を「布フィルターセット」と反応・付着させることによりろ過し、スケールの発生を未然に防ぐことで、故障のリスクを低減します。


イオン交換器Ⅱの内部に使用されている布フィルターセットには、吸着できるカルシウムなどの量に限りがあるため、一定の使用期間・処理水量を超えると、ろ過能力が大きく低下します。交換時期の目安については、次のページに記載しておりますのでご参照ください。

◆使用準備

1. 「イオン交換器Ⅱ」の底プラグを開け、流水で1分以上ゆすいでください。
この時に布フィルターセットを軽く指で押し空気を抜いてください。
2. 底プラグを閉めた後、水を入れた水タンクの中に沈めて、容器内の空気を抜いてください。
容器が浮き上がらないように指で押さえながら、ホースジョイントの口から気泡が出なくなるまでお待ちください。
3. 吸水用のホースをホースジョイントに差し込みます。

使用準備動画

▼こちらから▼

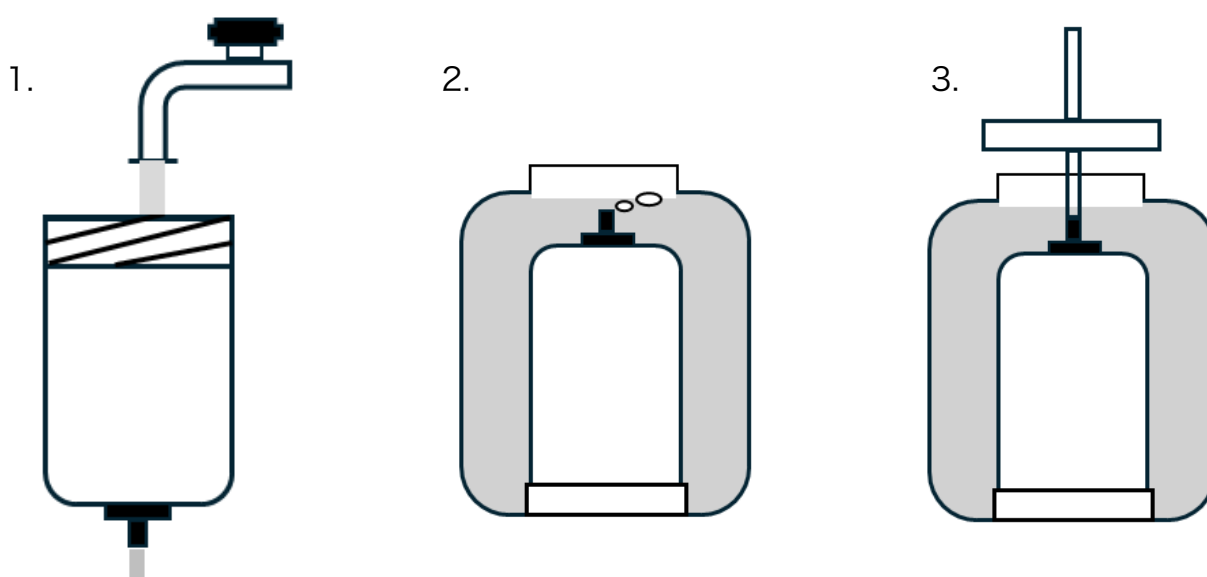

！注意

イオン交換器Ⅱ内に空気が残っていると、水を正常に吸い上げられなくなったり、吸い上げに時間がかかる原因になります。使用前に必ず底プラグを開けて1分以上流水でゆすぎ、十分に気泡を抜いてからご使用ください。

交換・詰替え時期の目安について

水の補充頻度 (2.5L補充/回)	交換・詰替え時期の目安	お勧めのイオン交換器Ⅱタイプ
2日以上で1回補充	1年までに	シングルパック
1日に1回補充	約6ヵ月までに	シングルパックまたはダブルパック
1日に2回補充	約3ヵ月までに	ダブルパックまたはトリプルパック
1日に3回補充	約2ヵ月までに	トリプルパック
1日に4回補充	約1.5ヵ月までに	
1日に5回補充	約1.2ヵ月までに	
1日に6回補充	約1ヵ月までに	

セット内容

- ◆シングルパック：「イオン交換器Ⅱ本体」＋「吸水ホース」
- ◆ダブルパック：「イオン交換器Ⅱ本体」＋「詰替用パック×1」＋「吸水ホース」
- ◆トリプルパック：「イオン交換器Ⅱ本体」＋「詰替用パック×2」＋「吸水ホース」

- ・交換・詰替え時期は目安であり、水質や使用環境などによって異なる場合がございます。
- ・シングルパック、ダブルパック、トリプルパックいずれをご使用の場合にも、使用開始より1年以内でセット品を使い切り、新たなセットをご購入の上、ご利用いただくことをお勧めいたします。
- (例) 2～3日に1回程度で水を補充する頻度のお客様がトリプルパックを購入し、3年に渡ってご使用されるような、ご使用方法はお勧めいたしません。
- ・付属のキーホルダーに使用開始日のシールを貼り、見えるところに取り付けてください。

◆詰替え用パックへの交換方法

1. 「イオン交換器」の底ブタを開け、容器から布フィルターセットを取り出します。
2. アルミパックから詰替え用布フィルターセットを取り出し、布フィルターの切り口が底面から見える方向になるように入れてください。
※アルミパックは詰替えを行う時までは開封しないでください。
3. 「使用準備 1・2・3」の手順を行ってください。

⚠注意

1. 水タンクに水がない状態で吸水を続けると、イオン交換器内に空気が溜まり、水を吸い上げなくなることがあります。必ず水が無くなる前に給水してください。
万が一、吸い上げなくなった場合は「使用準備 1・2・3」の手順を行い空気を抜き、口コモに付属している注射器で水を数回押し込んでから吸水してください。
2. 詰替え用パック（布フィルターセット）はアルミパックで密封されています。
※直射日光や高温になる場所は避けて保管してください。