

入れ歯の キズ取りクリーム

Flex Shine Pro Paste 患者用

こんなストレスを
感じている患者さんに

- ・ザラザラが気になる…
- ・キズに菌が繁殖してそう…
- ・透明感がなくなってきた…
- ・ツルツル感を維持したい…
- ・キズだけならセルフケアで
なんとかしたい…

ご使用方法

※1週間に1回のお手入れを推奨




お手入れ前に入れ歯の水気を拭き取ってください。



キズやザラつきが気になる部分をキッチンペーパー等の丈夫な素材で本品を適量拭い、ていねいにみがいてください。



入れ歯をみがき終わったら中性の食器用洗剤で油分を取り、水で十分に洗い流して下さい。その後は通法通りに義歯洗浄剤にてお手入れください。

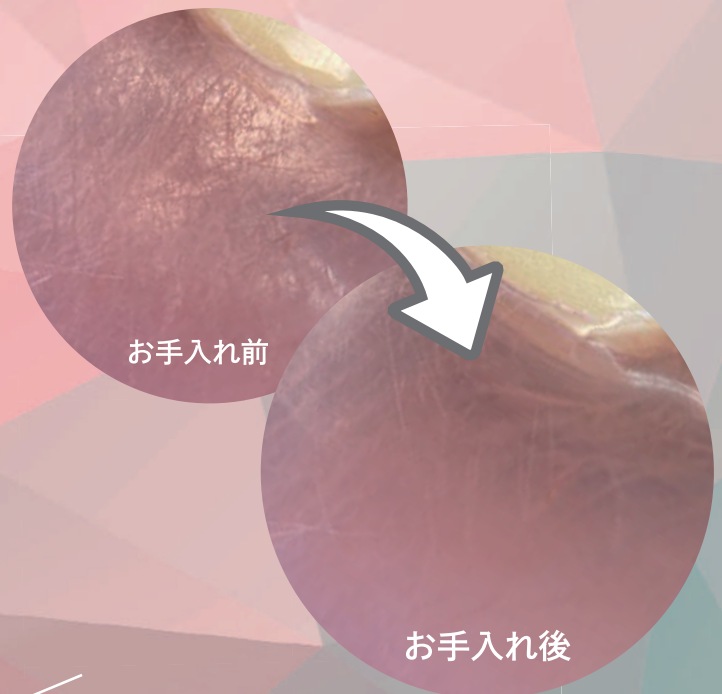

磨いてピカッと
ザラつきを解消
自宅で簡単セルフケア

Full denture
Partial denture
Non-clasp denture



内容量：7g
※週1回のご使用で約3カ月分
患者価格
¥1,500 (税別)

一般医療機器 歯科用研磨器材
27B3X00139000089

DAIEI
Angel 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

※本製品の仕様およびデザインは予告なく変更となる場合がございます。