

MD-R1



ヒートショック対応・マイコンファーンレス

DAIEI DENTAL PRODUCT CO.,LTD.

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN



価格等の情報は
こちらから


余裕の炉内スペース

炉内はφ90mm リングなら2個収納でき、間口は幅140mmあるので、リングバサミを使っての出し入れがスムーズです。

最高温度	: 1000°C
本体寸法	: W295×H390×D390 (mm)
炉内寸法	: W140×H95×D200 (mm)
電源電圧	: AC100V 50/60Hz
電力	: 100V・1100W
外部電源	: 100V 300W (2箇所合計)
本体重量	: 約17kg
警告装置	: 熱電対断線警告、ヒーター断線警告など
付属部品	: リング受皿 コンセントプラグアダプター (3P→2P変換用アダプター)

仕様

一般的名称: 歯科技工用リング焼却炉 分類: クラスI 届出番号: 27B2X00306K00028

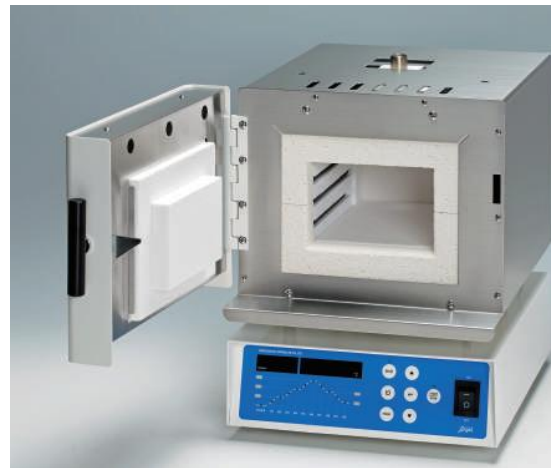

10パターンの豊富なプログラムであらゆる昇温に対応


700°Cまで15分(空焼き時)で昇温し、最高温度は1000°C、係留ステージも5段階まで登録できる、汎用性の高い電気炉です。様々な昇温に対応した10パターンのプログラムがプリセットされていますので、プログラム番号を選んですぐにお使い頂くことができます。すべてのパターンでオリジナルプログラムに変更することも可能です。

簡単操作と多くの機能とを兼ね備えた前面パネル

昇温開始は電源を入れてプログラム番号を選び、スタートスイッチを押すだけの簡単設計です。プログラムの変更も昇温グラフを見ながらタッチパネルで直感的に登録できます。予約タイマーは99時間99分先まで選択できるうえ、スタート予約では無く、最終係留が終わるまでの全工程時間を差し引いた**プログラム終了時刻**を予約できるので、鑄造のスケジュールを立て易いです。

プログラム表示

プログラムモード時の登録番号を表示します

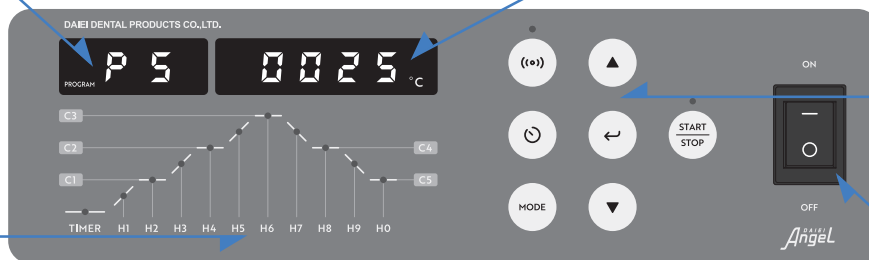

動作ステージ表示

昇温行程の経過を表示します

温度表示

現在炉内温度や設定温度を表示します

各種設定キー

フラットパネルで軽いタッチで操作できます

電源スイッチ

エンゼルエースクリーナーは、吸引ファンと白金触媒の力で、ワックス焼却時の診察室・技工室や戸外へ流れる不快臭を取り除き、しかも術者の健康を守ります。

また、快適な環境のもとで能率よく作業ができます。

本体寸法	: W230×H185×D210 (mm)
本体重量	: 5kg
電源電圧	: AC100V 50/60Hz
電力	: 300W
触媒	: 白金触媒

仕様

一般的名称: 歯科技工用鑄造器関連器具 分類: クラスI 届出番号: 27B2X00306K00020



ACE
CLEANER
電気炉用脱臭装置

大榮 歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387
名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅前3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

<http://www.daiei-dental.jp>

※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。