

石膏阻集器用
(トラップ)

DAIEI
Angel

消臭・分解する微生物浄化剤

エンゼルバイオクリーナー



悪臭の元「硫化水素ガス」がなくなります！
環境衛生の改善に！

ランニングコストは石膏阻集器をご使用の
場合 1日 33円！

NET.400g



価格等の情報は
こちらから

使用方法

●石膏阻集器

毎週1回診察終了後、シンク内の目皿を外して専用カップ約3/5(目盛15)を排水口に入れ、水を約300cc流してください。

※夏場や石膏の使用量が多い場合は毎日キャップ1杯分を入れて下さい。

●抜去歯容器(撤去冠容器には入れないでください。)

抜去歯容器にキャップ1杯分を振り掛けて、水を少量掛けて下さい。

DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.

環境衛生に貢献する「エンゼルバイオクリーナー」とは？

● 悪臭をカット

悪臭の元である、硫化水素、メルカプタン、吉草酸と汚泥も分解します。

●ヌメリが無くなります

阻集器の清掃時にヌメリが付いていないので洗浄が楽に行えます。

● 使用は週に1回だけ

週に1回シンクの排水口からエンゼルバイオクリーナーを注ぐだけで効果を発揮します。

● 清掃頻度が少なくなります

エンゼルバイオクリーナーが分解するので石膏泥が溜まるまで清掃が不要です。

● コストが安い

エンゼルバイオクリーナーのランニングコストは1日あたり33円です。※石膏阻集器にご使用の場合

ご使用の際の注意

※ 石膏阻集器の清掃直後からご使用ください。清掃していない阻集器に使用すると清掃時には悪臭があります。

※ エンゼルバイオクリーナーは排水口から入れて下さい。排水口の周りのステンレスに付着すると変色します。

※ 阻集器の中が黒くなる場合がありますが硫化水素が原因です。色は取れませんが材質は傷めません。

関連商品

石膏阻集器 クリーンボックスミニ

石膏・ワックス・ゴミなど除去します。半透明の本体なので外から汚れ具合を確認できます。ホースを片側に集める事により、本体以外に必要な容積をコンパクト化しました。

オプション： 万能アダプター
排水栓



石膏阻集器用硬化剤 エンゼルクリーンポリマー

吸水性のポリマーが、石膏泥の水分を吸い取って、凝固させます。固まった石膏泥は石膏阻集器から簡単に取り出すことができます。

400g入



2023. 03

ANGEL 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387
名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅前3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897