



## 大栄歯科産業株式会社 サンドブラスター用研磨材

材質	名称	用途	対象機種	容量
ガラスビーズ	 <b>サンド荒</b>	クリストバライト系埋没材除去 リン酸塩系埋没材除去 循環用 粒径 約 400 $\mu$ m	サイクルブラスターJr. サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	680 g
	 <b>サンド細</b>	クリストバライト系埋没材除去 循環用 粒径 約 140 $\mu$ m	サイクルブラスターJr. サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	820 g
	 <b>#G-12</b>	クリストバライト系埋没材除去 循環用 粒径 約 140 $\mu$ m	サイクルブラスターJr. サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	3 k g
	 <b>#G-32</b>	メタル表面のガラスビーズ研磨 デンチャーの石膏除去 プレスセラミックスの掘り出し 加圧用 粒径 約 50 $\mu$ m	サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	4 k g
	 <b>ガラスビーズDパック</b>	メタル表面のガラスビーズ研磨 デンチャーの石膏除去 プレスセラミックスの掘り出し 加圧用 粒径 約 50 $\mu$ m ※ 材質はG-32と同じ	サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	150 g $\times$ 15 袋
酸化アルミナ	 <b>#A-10</b>	リン酸塩系埋没材除去 金属床酸化皮膜処理 循環用 粒径 約 110 $\mu$ m	サイクルブラスターJr. サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	3 k g
	 <b>#A-22</b>	メタルボンド金属表面アルミナ処理 CAD/CAM冠の内面処理 加圧用 粒径 約 50 $\mu$ m	サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	4 k g
	 <b>アルミナS Dパック</b>	メタルボンド金属表面アルミナ処理 CAD/CAM冠の内面処理 加圧用 粒径 約 50 $\mu$ m ※ 材質はA-22と同じ	サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	150 g $\times$ 15 袋
カーボランダム	 <b>#360</b>	リン酸塩系埋没材除去 金属床酸化皮膜処理 循環用 粒径 約 200 $\mu$ m	サンデックスV	3 k g

循環用：作業BOX内で研磨材が循環する  
加圧用：使い切りの研磨材を補充して使用する

# サンドブラスター用研磨材の使い分け方法

## ● 金属床の酸化皮膜の表面処理

種類	商品名	対応機種
カーボランダム	#360	サンデックスV
酸化アルミナ	#A-10	サイクルⅡ・Ⅲ・Jr.

## ● リン酸塩系埋没材から鋳造物の掘り出し

種類	商品名	対応機種
アルミナ	#A-10	サイクルⅡ・Ⅲ・Jr.
ガラスビーズ	サンド荒	サイクルⅡ・Ⅲ・Jr.

## ● クリストバライト系埋没材から鋳造物の掘り出し

種類	商品名	対応機種
ガラスビーズ	サンド荒	サイクルⅡ・Ⅲ・Jr.
ガラスビーズ	サンド細	サイクルⅡ・Ⅲ・Jr.
ガラスビーズ	#G-12	サイクルⅡ・Ⅲ・Jr.

## ● 金属表面を光らせる

種類	商品名	対応機種
ガラスビーズ	#G-32	サイクルⅡ・Ⅲ
ガラスビーズ	ガラスビーズDパック	サイクルⅡ・Ⅲ

## ● デンチャーの細かな部分に付着した石膏を除去

(エア圧0.3Mpa以下)

種類	商品名	対応機種
ガラスビーズ	#G-32	サイクルⅡ・Ⅲ
ガラスビーズ	ガラスビーズDパック	サイクルⅡ・Ⅲ

## ● プレスセラミックスの掘り出し

種類	商品名	対応機種
ガラスビーズ	#G-32	サイクルⅡ・Ⅲ
ガラスビーズ	ガラスビーズDパック	サイクルⅡ・Ⅲ

## ● メタルボンド用フレームの表面処理

種類	商品名	対応機種
酸化アルミナ	#A-22	サイクルⅡ・Ⅲ
酸化アルミナ	アルミナスDパック	サイクルⅡ・Ⅲ

## ● CAD/CAM冠の内面処理

種類	商品名	対応機種
酸化アルミナ	#A-22	サイクルⅡ・Ⅲ
酸化アルミナ	アルミナスDパック	サイクルⅡ・Ⅲ

サイクルⅡ = サイクルジュニアⅡ  
 サイクルⅢ = サイクルジュニアⅢ  
 サイクルJr. = サイクルブラスターJr.



価格等の情報は  
こちらから

DAIEI 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
 東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387  
 名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897