

超強光 LED 照射器 マイティーライト

MIGHTY LIGHT



標準価格 29,800 円（税別）

3000

最大3000mW/cm²
のハイパワー

110

110g の軽さ

7

選べる7つのモード

MIGHTY LIGHT



操作手順

① 電源を入れる



照射スイッチで ON/OFF

② モード・時間を選択



スイッチを押してモード選択を行い、スイッチ長押しで時間を選択

③ 照射スイッチ




スイッチを押して照射

7つのモード

M1

標準モード

照射時間 5-20 秒
光強度 1000-1300mW/cm²

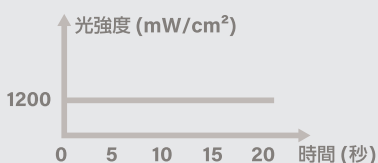

M2

強光モード

照射時間 3-5 秒
光強度 1800-2100mW/cm²



M3

超強光モード


照射時間 1-3 秒
光強度 2700-3100mW/cm²



M4

矯正モード

照射時間 3秒/5回, 3秒/10回
光強度 2700-3100mW/cm²

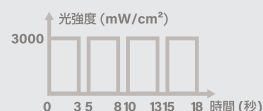

M5

検査モード

照射時間 30 秒, 60 秒
光強度 —

M6

パルスモード


照射時間 5-20 秒
光強度 1000-1300mW/cm²



M7

プログレッシブモード

照射時間 5-20 秒
光強度 1000-1300mW/cm²

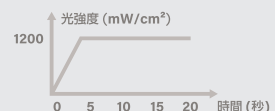

内容仕様 ●本体 ●ライトガイド ●内蔵リチウムイオンバッテリー ●充電器本体 ●ACアダプター ●ライトバリア
●販売名:マイティーライト ●電源電圧:AC100V ●消費電力:5W ●波長:385nm~515nm ●使用光源:青色LED ●寸法:本体:W23mm×H23mm×L204mm(ライトガイド含む)
充電器:W80mm×H70mm×L50mm ●重量:150g(本体) ●一般医療機器 歯科重合用光照射器 ●特定保守管理医療機器 ●届出番号:11B1X10025000003

製造販売元

アドバンスジャパン株式会社 〒334-0063 埼玉県川口市東本郷118-1 TEL 048-234-8291 FAX 048-211-0861

販売元

Angel 大栄歯科産業株式会社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京 TEL.03-6806-3381 名古屋 TEL.052-731-0610 福岡 TEL.092-473-7567