


# エンゼルバイブレーターデジタル

## 取扱説明書

### 名称と機能

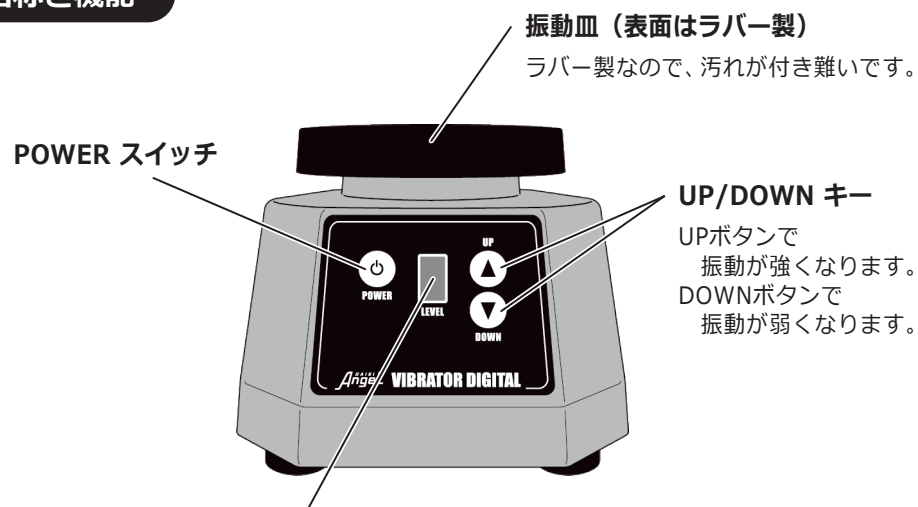

### 振動レベル表示

振動の強さは6段階に調整できます。  
POWERスイッチを切る直前の振動レベルを記憶しているので、  
次回スイッチを入れたら、同じ振動レベルでスタートします。

### 使用上のご注意

- ① 振動皿部に過度の重量物を乗せないでください。故障の原因になります。
- ② 不安定な場所におかないでください。
- ③ 次のような場所でのご使用は避けてください。  
ー 直射日光、水、塩水、腐食性ガス、ホコリ等の多い場所 ー
- ④ 異常を感じましたら、電源プラグをコンセントから抜いて、使用を中止してください。

### 仕様・定格

名称	エンゼルバイブレーター デジタル
本体寸法	W140×H110×D140 (mm)
振動テーブル寸法	φ108 (mm)
電力	AC100V 150W 60Hz
重量	2.0kg
定格時間	5分
レベル調整	タッチパネルによる6段階設定

### アフターサービスについて

- ◎ 保証書（別に添付してあります）  
保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ年月日」などの記載内容をご確認のうえお受け取りください。保証内容をよくお読みいただいた後、紛失しないよう大切に保管してください。
- ◎ 保証期間  
お買い上げの日から6ヶ月間。電源切り忘れのコイル焼けは対象外です。
- ◎ 修理を依頼されるとき  
点検をしていただいてもなお異常のあるときは、故障状況をなるべく詳しくご連絡ください。
  - ◇ 保証期間中のとき（保証書に販売店名、日付印がないと無効となります。）  
おそれ入りますが、お買い上げの販売店まで、保証書を添えてご連絡ください。  
保証書の規定に従って修理いたします。
  - ◇ 保証期間が過ぎているとき  
お買い上げの販売店に、まずご相談下さい。  
修理によって機能を維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### ！ 重要

- 機械保護のため5分以上の連続使用はお避けください。  
→ コイルの過熱により故障の原因となります。
- 使用後は忘れずに電源をお切りください。
- 本体が熱を持った状態で通電しても作動しない場合は、電源を切り  
本体が室温まで冷えてからご使用ください。  
それでも作動しない場合は当社までお問い合わせください。

2025.05

**Angel 大栄歯科産業株式会社**

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京 TEL.03-6806-3381 名古屋 TEL.052-731-0610 福岡 TEL.092-473-7567