


Angel Portable Motor BELTE

取扱説明書

この度は、BELTEをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書は製品の正しい使い方についての説明をしています。
ご使用になられる前に、機能等を十分ご理解の上ご使用ください。
また、この取扱説明書は保証書と共に大切に保管してください。

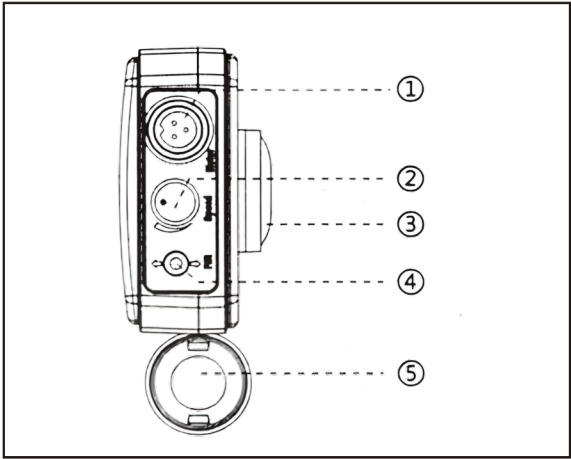


- ① ハンドピースインターフェイス
- ② スピード調整ダイヤルスイッチ
(ON／OFFスイッチ機能付)
- ③ ベルトフック
- ④ F（フォワード）／R（リバース）切り替え
及び一時停止スイッチ
- ⑤ ハンドピースホルダー

【保証規定】

- ◆本製品の保証は購入日及び販売店を証明するため、本書と販売店から発行される納品書を同梱してください。
- ◆保証期間中に取扱説明書、添付文書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。但し、保証期間内であっても以下の場合で有償修理と判断した場合は別途御見積となりますので、予めご了承ください。
 - ・使用上の誤り、不正な改造および修理、分解等が行われた場合
 - ・お買上後の輸送や移動、落下による故障及び損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷等の天災、公害、塩害、ガス害、また異常電圧による故障及び損傷
 - ・本書の提示がない場合
 - ・消耗部品を取り換える場合
 - ・不適当な消耗品やパーツの使用に起因して本装置に生じた故障及び損傷

保 証 書	
品名	Angel Portable Motor BELTE
保証期間	6カ月
お客様名	
お客様住所	
お客様電話番号	
販売元	大栄歯科産業株式会社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-10-17 06-6441-3332

※本書は日本国内においてのみ有効です。また、この保証書によってお客様の権利を制限するものではありません。尚、保証期間終了の修理等、アフターサービスについてご不明の点は、お買上の販売店へお問い合わせください。

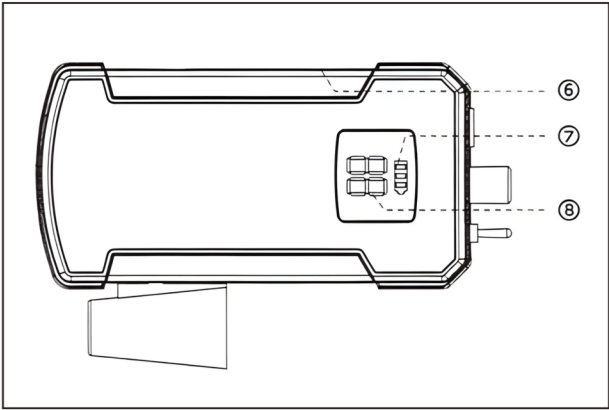

- ⑥ A C アダプター接続口（電源入力口）
- ⑦ パワーディスプレイ(電池残量表示ランプ)
- ⑧ スピードディスプレイ

【使用方法】

- ① コントロールボックスの電源が切れていることを確認してください。
- ② コントロールボックスにハンドピースを接続してください。
※コントロール側台バンドピース側のコネクト部分の形状をあわせる必要があります。必ず接続口の向きをご確認ください。
- ③ ハンドピースのビットがしっかりと固定されているか確認してください。
- ④ 片手でハンドピースを持ち、一方の手でコントロールボックスの電源ダイヤルスイッチを回してください。電源が入るとピッと音がし、スピードディスプレイに「00」と表示します。
- ⑤ R／Fスイッチで正転・反転を選択した後、ダイヤルスイットを回してハンドピースの速度を調整ください。最大回転数は35,000rpmです。
※表示の数値は、あくまで回転数の目安です。

【使用上の注意】

- ※本製品のハンドピースは、絶対にご自身で分解しないようお願いいたします。気になる点がございましたら、まずは弊社にお問合せ下さい。
- ※本製品は精密機器です。本書の使用方法に従いご使用ください。
- ※ 過負荷をかけるとディスプレイにエラーコード「A2」が表示され、自動で一時停止し、エラーが連続すると再起動が必要になります。安全なご使用の為に注意喚起機能ですので、押さえつける力を弱めてご使用ください。

【先端工具の交換】



ロックリングを反時計回りにしっかりと回し、ビットを固定します。取り外す際には、ロックリングを時計回りに回してビットを取り外します。
▼を   マークに合わせてください。

【交換する際の注意】

※ ロックリング上部のキャップをまわすと、ハンドピースが分解されますのでご注意ください。

【充電について】

- 充電時間：3 時間（フル充電）
- 連続回転時間：1 0 時間（無負荷時）
※作業によって使用可能時間は異なります。
※ご使用期間及び使用頻度により異なります。
- 電池残量表示ランプの目安(スイッチがONの時)
 - ・ 緑ランプ3つ・・・充電がフルの状態（1 0 0 ～ 9 0 %）
 - ・ 緑ランプ2つ・・・継続使用が可能な状態（9 0 ～ 3 0 %）
 - ・ 緑ランプ1つ・・・そろそろ充電の状態（3 0 %未満）
- 電池残量表示ランプが1 つ点灯になってからの充電をお勧めします。
- 電池残量表示ランプは、スイッチOFFの時には、ACアダプターを接続すると充電状態を表示します。
 - ・ 赤ランプ1つ点灯・・・充電中
 - ・ 緑ランプ1つ点灯・・・充電完了

【充電する際の注意】

- 1 必ず本製品に付属された、A C アダプターを使って充電してください。
- 2 気温0℃以下、40℃以上の環境下では充電しないでください。
- 3 感電を防ぐため、濡れた手で端子部分に触れないでください。
- 4 可燃性の液体や気体の近くで充電しないでください。
- 5 充電しながらの使用は可能ですが、バッテリーに負荷が掛り劣化の原因になる可能性がございます。アダプターを外してのご使用をお勧めします。
- 6 コントロールボックスの上には、物を乗せないでください。
- 7 コントロールボックスを布等で覆わないでください。
- 8 濡らしたり、落としたりしないようにしてください。
- 9 分解や改造をしないでください。
- 10 端子やコネクター部分に、異物をいれないでください。

【製品仕様】

コントロールボックス	
サイズ	W155mm×D73mm×H37mm
重量	240 g
入力電圧	DC12V／2A
充電時間	3時間
連続使用時間	10時間（無負荷状態）
ハンドピース	
直径	Φ18.5mm
長さ	131mm
重量	120 g
軸径	Φ2.35mm
A C アダプター	
入力	100-240V 50/60Hz,0.5A
出力	Max 12V - 2A

【安全上の注意】

1 使用環境条件

- ・ 温度：0℃～40℃
- ・ 湿度：35％～70％
- ・ 気圧：1.060 h Pa（アンダー）
- ・ 環境：引火性の物から遠ざけ、必ず換気をしてください。

2 使用上のご注意

- ・ 傷んだ電源コード、電源プラグは感電や火災の原因となりますので絶対に使用しないでください。
- ・ 感電、火災を防止するため電源コードを過度に曲げたり、重いものを乗せたりしないでください。
- ・ 電源コードを抜く際は、必ずUSB端子を持って抜いてください。
- ・ 電源コードを熱器具に近づけないでください。
- ・ 本製品を作動させたまま放置しないでください。
- ・ 分解や改造をしないでください。火災や感電、機器の損傷、ケガの原因になる恐れがあります。
- ・ ハンドピースを落とさないように注意してください。
衝撃により故障の原因となります。
- ・ ハンドピースの振動や異音が大きい、熱い等何らかの異常を感じた場合は絶対にご自身で分解したりせず、販売店へご連絡ください。
- ・ 水などの液体がハンドピースに、侵入しないように注意してください。
- ・ ハンドピースは、テストバーを常に差し込んだ状態で保管してください。
- ・ 破損やゆがみ等、不具合のあるテストバーは、使用しないでください。
- ・ ビットを交換するときは動作が完全に停止していることを確認してから交換してください。
- ・ 取扱説明書に従ってお使いください。
- ・ 本書の指示に従わない場合の事故に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。