


Angel Pocket Motor

PENTA

取扱説明書

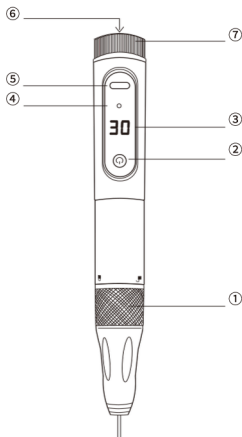

機能説明

① ロックリング

② パワーボタン（回転／停止スイッチ）

※2回続けて押すとバッテリー残量が表示されます。

③ 液晶画面（回転数・充電残量表示）

※バッテリー残量が少なくなると「Lo」と表示されます。

※「Lo」の表示が出続ける場合は機体の温度が下がるまでご使用をお控え下さい。

※エラー時は「Er」と表示されます。

④ 充電インジケータランプ

※充電時（赤ランプ点灯）、充電完了時（緑ランプ点灯）

⑤ 充電差込み口(5V USB)

※急速充電タイプは非対応です。5V1~2A程度のアダプターをご使用ください。

また充電しながらのご使用は推奨しません。

⑥ 回転方向変換ボタン

※ボタンを押す毎に正回転と逆回転が切り替わります。

⑦ 回転速度調整

※右に回すと回転速度UP、左に回すとDOWNとなります。

製品仕様

入力端子/定格入力	回転速度	バッテリー容量
USB Type-C/DC5V	MAX30,000RPM	1200mAh




対応ビット直径	ハンドピース直径	L 全長
φ2.34~2.35mm	φ22mm	168mm


充電時間	連続使用時間
約3.5時間	約5時間(無負荷時)

■ ビット交換方法

作業を行う時は必ず本体の電源をOFFにして行ってください。

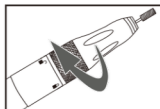

1. カチッという音がなるまでロックリングを矢印方向(鍵の開いたマーク方向)に回して下さい。

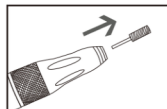

2. 元のビットを引き出して取り外します。



3. 使用するビットを差込みます。



4. ロックリングを矢印方向(鍵の閉じたマーク方向)にしっかりと回し、ビットを固定します。

■ 付属品

- ・ 取扱説明書
- ・ 充電用USBケーブル

1.使用環境条件

- ・温度：0℃～40℃・湿度：35%～70%・気圧：1.060 hPa（アンダー）
- ・環境：引火性の物から遠ざけ、必ず換気をしてください。

2.使用上のご注意

- ・傷んだUSBコード、USBプラグは感電や火災の原因となりますので絶対に使用しないでください。
- ・感電、火災を防止するためUSBコードを過度に曲げたり、重いものを乗せたりしないでください。
- ・USBコードを抜く際は、必ずUSB端子を持って抜いてください。
- ・USBコードを熱器具に近づけないでください。
- ・本製品を作動させたまま放置しないでください。
- ・分解や改造をしないでください。火災や感電、機器の損傷、ケガの原因になる恐れがあります。
- ・ハンドピースを落とさないように注意してください。衝撃により故障の原因となります。
- ・ハンドピースの振動や異音が大きい、熱い等何らかの異常を感じた場合は、絶対にご自身で分解したりせず、販売店へご連絡ください。
- ・水などの液体がハンドピースに、侵入しないように注意してください。
- ・ハンドピースは、テストバーを常に差し込んだ状態で保管してください。
- ・破損やゆがみ等、不具合のあるテストバーは、使用しないでください。
- ・ビットを交換するときは動作が完全に停止していることを確認してから交換してください。
- ・取扱説明書に従ってお使いください。
- ・本書の指示に従わない場合の事故に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。

【保証規定】

- ◆本製品の保証は購入日及び販売店を証明するため、本書と販売店から発行される納品書を同梱してください。
- ◆保証期間中に取扱説明書、添付文書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。但し、保証期間内であっても以下の場合で有償修理と判断した場合は別途御見積となりますので、予めご了承ください。
 - ・使用上の誤り、不正な改造および修理、分解等が行われた場合
 - ・お買上後の輸送や移動、落下による故障及び損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷等の天災、公害、塩害、ガス害、また異常電圧による故障及び損傷
 - ・本書の提示がない場合
 - ・消耗部品を取り換える場合
 - ・不適当な消耗品やパーツの使用に起因して本装置に生じた故障及び損傷

保 証 書

品名	Angel Pocket Motor PENTA		
保証期間	6カ月		
お客様名			
お客様住所			
お客様電話番号			
販売元	大栄歯科産業株式会社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-10-17 ☎ 06-6441-3332		

※本書は日本国内においてのみ有効です。また、この保証書によってお客様の権利を制限するものではありません。
尚、保証期間終了の修理等、アフターサービスについてご不明の点は、お買上の販売店へお問い合わせください。